


SEFAMCONNECT

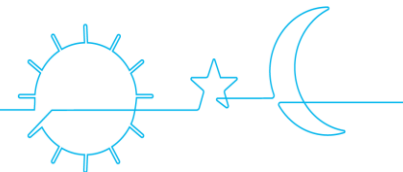

Manuel d'utilisation



Fabricant :

SEFAM

144 AV CHARLES DE GAULLE

92200 NEUILLY SUR SEINE

France

Site de fabrication et agence technique :

SEFAM

10 allée Pelletier Doisy

54600 Villers-lès-Nancy

France

TEL : +33 (0) 3 83 44 85 00

www.sefam-medical.com**Assistance technique :**

TEL : +33 (0) 6 84 20 23 20

E:mail : support@sefam-medical.com

TABLE DES MATIERES

Description du dispositif	4
Destination d'utilisation	4
Indication d'utilisation	4
Contre-indications	4
Avertissements et précautions	5
Potentielles effets secondaires indésirables	5
Patients cibles	5
Utilisateurs	5
Environnement d'utilisation	6
Bénéfices cliniques	6
Performance essentielle du dispositif	6
Présentation du logiciel	6
Connexion et Inscription	8
Inscription des docteurs :	9
L'accueil	10
Profil de l'utilisateur	11
Tableau de bord	13
Navigation générale	14
Menu principal	14
La pagination et filtres	15
Organisations	16
Menu Patients	19
Liste des machines	44
Historique des réglages	48
Liste des utilisateurs	51
Liste des docteurs	54
Paramètres d'analyses	55
Cybersécurité	57
En cas de problèmes	58
Définition des symboles	58
Marquage CE	59
Hébergement et Sécurité des données	59
Glossaire	60

Description du dispositif

Ce mode d'emploi est destiné aux médecins et aux prestataires de soins à domicile. Il ne doit en aucun cas être remis aux patients. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le logiciel afin de comprendre les contraintes d'utilisation du dispositif.

Destination d'utilisation

SEFAM Connect est conçu pour aider le professionnel de santé ou le prestataire de soins à collecter les données de traitement enregistrées par l'appareil de pression positive utilisé par le patient souffrant d'apnée du sommeil. Il leur permet d'analyser ces données et, si nécessaire, d'adapter les paramètres de traitement du patient.

Indication d'utilisation

Le logiciel SEFAM Connect est utilisé en association avec les appareils de PPC SEFAM. Le logiciel SEFAM Connect est indiqué pour adapter le traitement du syndrome d'apnée obstructive du sommeil.

Contre-indications

Il n'y a pas de contre-indication à l'utilisation de SEFAM Connect.

Cependant, pour les dispositifs de PPC SEFAM, les études ont montré que l'utilisation d'un dispositif à pression positive est contre-indiquée chez certains patients présentant l'une des pathologies préexistantes suivantes :

- Emphysème bulleux sévère
- Pneumothorax
- Pneumoencéphalie, traumatisme ou chirurgie récente avec séquelle de fistule cranionasopharyngée
- Insuffisance cardiaque décompensée ou hypotension, particulièrement en cas de déplétion du volume sanguin ou en cas de troubles du rythme cardiaque
- Déshydratation
- Trachéotomie.

En outre, étant donné que la pression positive affecte le débit cardiaque chez certains patients souffrant d'insuffisance cardiaque, il est recommandé de surveiller attentivement la pression artérielle et la fréquence cardiaque du patient lors de l'instauration du traitement à une pression efficace. Les risques et les bénéfices du traitement par pression positive continue doivent être évalués individuellement chez ces sujets. Cette évaluation doit tenir compte du fait que l'appareil peut être réglé pour délivrer des pressions allant jusqu'à 20 cm H₂O et que, dans certaines conditions de défaut, des pressions statiques allant jusqu'à 40 cm H₂O sont possibles. Le dispositif ne doit alors pas être utilisé si un tel niveau de pression présente un risque pour le patient.

Avertissements et précautions

AVERTISSEMENT

Signifie dans ce manuel qu'il existe un risque de blessure ou d'accident pour le patient, lui-même ou d'autres personnes.

- Le logiciel SEFAM Connect est une aide à l'analyse des données d'observance et ne constitue pas un diagnostic automatique.
- Le logiciel SEFAM Connect ne peut être utilisé qu'avec un appareil de PPC SEFAM compatible.
- Avant d'utiliser le logiciel avec un appareil, veuillez prendre connaissance des consignes de sécurité relatives à cet appareil, qui figurent dans les manuels correspondants.

ATTENTION

Signifie dans ce manuel qu'il existe une possibilité d'endommager le logiciel ou le matériel utilisé.

- Il est indispensable de comprendre le fonctionnement du logiciel avant de l'utiliser avec l'appareil concerné.
- Veuillez utiliser régulièrement un logiciel antivirus sur l'ordinateur que vous utilisez et vous conformer aux exigences de sécurité.
- Votre mot de passe est strictement personnel et ne doit pas être partagé.
- La protection de l'accès aux données est réalisée par la gestion des profils utilisateurs de Windows®. Il est donc recommandé d'activer cette gestion pour garantir la confidentialité des informations

Pour toute question relative à l'utilisation du logiciel, prenez contact avec l'agence technique dont l'adresse est indiquée au début du manuel.

Potentielles effets secondaires indésirables

Il n'y a pas d'effets indésirables associés à l'utilisation de SEFAM Connect.

Cependant, pour les dispositifs SEFAM PPC, les effets secondaires indésirables potentiels, qui dans certains cas peuvent nécessiter l'arrêt temporaire du traitement, comprennent : douleur thoracique inhabituelle, maux de tête sévères, augmentation de la dyspnée, sécheresse des voies respiratoires ou du nez, sensibilité de la peau, écoulement ou saignement du nez (épistaxis), gêne ou douleur dans les oreilles ou les sinus, ballonnements, somnolence diurne, changements d'humeur, désorientation, irritabilité ou perte de mémoire.

Patients cibles

Le logiciel SEFAM Connect ne peut être utilisé qu'avec les appareils fabriqués et commercialisés par SEFAM, indiqués pour le traitement de l'apnée du sommeil chez les patients pesant plus de 30 kg et dont la respiration est spontanée.

Utilisateurs

L'appareil est destiné aux professionnels de la santé et aux prestataires de soins à domicile.

Sefam Connect

Lors de la première utilisation du logiciel, les utilisateurs reçoivent une formation pour se familiariser avec les fonctions du logiciel et apprendre à l'utiliser correctement.

Environnement d'utilisation

Le SEFAM Connect est un logiciel SAAS qui ne nécessite aucune installation particulière. Pour fonctionner correctement, SEFAM Connect doit être utilisé avec les dernières versions des navigateurs Firefox, Chrome ou Edge.

Bénéfices cliniques

Il n'y a pas de bénéfice clinique direct pour le patient. Cependant, le logiciel permet aux professionnels de santé et aux prestataires de services de bénéficier d'informations pertinentes sur l'observance et/ou l'efficacité des traitements, en temps quasi réel ou sous forme de dossiers patients. Il contribue ainsi à l'évaluation thérapeutique médicale, en optimisant les mesures prises par le professionnel de santé pour améliorer le confort et l'observance du patient sur le long terme.

Performance essentielle du dispositif

Il n'y a pas de performance essentielle.

Présentation du logiciel

Le logiciel SEFAM Connect permet la réception, le stockage, la mise en forme et la sauvegarde des données transmises par les dispositifs médicaux SEFAM. Le produit permet aussi l'implémentation de nouveaux réglages sur les dispositifs médicaux SEFAM (sauf module MO+).

Ce logiciel ergonomique propose au professionnel de santé une solution complète et flexible, fournissant des informations pertinentes sur l'état de l'observance et/ou de l'efficacité du traitement, en quasi-temps réel ou sous forme d'historique. Par l'intermédiaire de boutons et d'icônes, il permet entre autres :

- d'identifier rapidement les patients les moins observants, ou les moins efficacement traités, de générer des alertes afin résoudre rapidement les situations anormales
- de visualiser et d'imprimer les données d'observance, de pression, de fuite et d'événements respiratoires mémorisées dans l'appareil.
- de configurer les réglages des appareils à distance, de gérer une liste de patients permettant d'accéder directement aux données nominatives telles que : informations personnelles, informations sur l'équipement utilisé et historique des données d'observance.
- d'éditer un rapport d'observance destiné au Praticien et au Prestataire de soins à domicile.

Il permet aussi au Professionnel de Santé à Domicile concerné de gérer son parc matériel ainsi que les utilisateurs et les droits d'accès aux données de la base, de configurer certaines de ses alertes ou des fichiers de données exportées.

Les manuels d'utilisation du logiciel SEFAM Connect sont accessibles via le logiciel et disponibles sur le site internet de SEFAM. Une copie papier du manuel peut être obtenue sur demande.

Remarques :

- Les dates affichées par le logiciel sont au format jour/mois/année (JJ/MM/AAAA) pour la langue française, mais cela peut dépendre des langues sélectionnées.

Connexion et Inscription

Accédez à <https://new.sefam-connect.eu/> puis saisissez votre identifiant et votre mot de passe.



SEFAMCONNECT
version 2.0.2

UNE PLATEFORME CENTRALISÉE POUR
LES MÉDECINS

BIENVENUE ! VEUILLEZ VOUS AUTHENTIFIER.

identifiant

mot de passe

SE CONNECTER

Mot de passe perdu ?

PAS ENCORE DE COMPTE ? REJOIGNEZ LA PLATEFORME SEFAM ET INSCRIVEZ-VOUS



En cas d'oubli du mot de passe, il est possible de le réinitialiser depuis « Mot de passe perdu ? » sur la page de connexion. Un mail de SEFAM Connect vous sera envoyé pour vous inviter à réinitialiser le mot de passe.



MOT DE PASSE PERDU ?

PAS D'INQUIÉTUDE.
VOUS ALLEZ RECEVOIR UN MAIL D'INSTRUCTION POUR RÉINITIALISER VOTRE MOT DE PASSE.
VEUILLEZ D'INDIQUER VOTRE IDENTIFIANT

identifiant

RÉINITIALISER MON MOT DE PASSE

[Retour](#)

Inscription des docteurs :

Les docteurs peuvent s'inscrire à SEFAM Connect en remplissant ce formulaire depuis la page de connexion (accessible par le lien « INSCRIVEZ-VOUS »). L'ajout de docteur est également possible par les prestataires (voir l'ajout de docteur dans la section de Menu patients).

PAS ENCORE DE COMPTE ? REJOIGNEZ LA PLATEFORME SEFAM ET [INSCRIVEZ-VOUS](#)

BIENVENUE !

Je suis un professionnel de santé ☒

POUR GARANTIR VOTRE SÉCURITÉ, LA SOCIÉTÉ SEFAM EST SUSCEPTIBLE DE VOUS CONTACTER POUR VÉRIFIER VOTRE IDENTITÉ. AUCUNE CONSULTATION DE PATIENT N'EST POSSIBLE DURANT CE TEMPS.

INFORMATIONS DU COMPTE

Identifiant (email)*

Code d'identification (RPPS ou autre)

INFORMATIONS PERSONNELLES

Nom*

Prénom*

Numéro de téléphone

LOCALISATION

Fuseau horaire*
Europe/Paris ▼

Pays*
France ▼

MENTIONS LÉGALES


[Conditions d'utilisation](#)

J'accepte les conditions d'utilisation* ☐


VALIDER

[Vous avez déjà un compte ?](#)

L'accueil

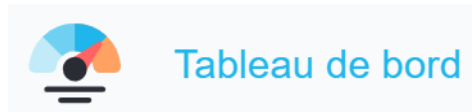

- Graphique d'observance des patients (nouveaux et patients au long cours)
- Graphique d'efficacité de traitement sur l'IAH (nouveaux et patients au long cours)

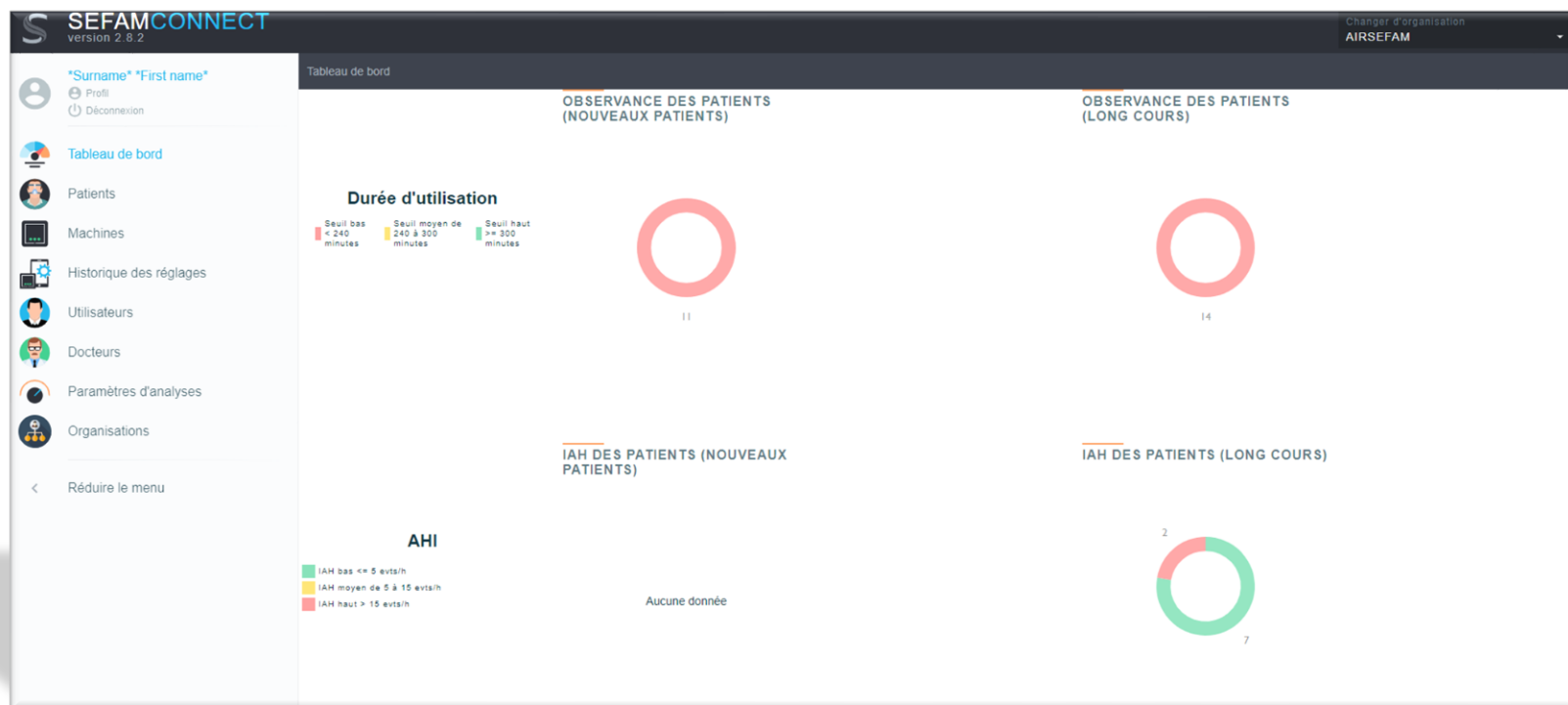

Il est possible de modifier les seuils Haut et Bas pour la représentation de ces indicateurs dans les paramètres d'analyse.

Profil de l'utilisateur

- Vos informations : prénom, nom, langue de l’affichage, identifiant, numéro de téléphone, nom de l’organisation, commentaires
- Liste des organisations



Nom Prénom

 Profil

 Déconnexion


 Tableau de bord


 Patients

 Machines

 Historique des réglages

 Utilisateurs

 Docteurs

 Paramètres d'analyses

 Organisations

 Réduire le menu

Profil



Vos informations

Prénom

Prénom

Nom

Nom

Langue

Français

Identifiant

@gmail.com

Téléphone

07XXXXXXX

Nom de l'organisation

AIRSEFAM

Commentaires

-

Liste des organisations

Rechercher une organisation

RECHERCHER

<

>

[1 À 10]

SUR 10 RÉSULTAT(S)

>

>

ID	Organisation	Description	Fuseau horaire	Téléphone	Code Pays
366	AIRSEFAM		Europe/Paris	03.83.44.85.99	FR
515	Sous org JSL	Description	Europe/Paris		FR
575	Organisation test		Europe/Paris		FR
577	Test vbastien		Europe/Paris		FR
592	Sefam UK		Europe/Dublin		IE
756	ACME JP	Pour test redirection JP	Asia/Tokyo		JP
629	ADOR		Europe/Paris		FR
606	Sefam US		America/Eirunepe		FR
795	PREFIXE TEST		Australia/Adelaide	000	AU
804	3e sous-orga		Asia/Tokyo		JP

<

>

[1 À 10]

SUR 10 RÉSULTAT(S)

>

>

Sefam Connect

L'accueil ▀ 11

Édition du profil :

The image displays three sequential screenshots of a web form titled "Modification de vos informations".

Screenshot 1: The form contains fields for "Nom", "Prénom", "Identifiant" (with "@gmail.com" entered), "Téléphone" (with "07XXXXXXX" entered), "Langue" (set to "Français"), and "Nom de l'organisation" (set to "AIRSEFAM"). A "Commentaires" field is at the bottom with a character count "0/200". A blue "MODIFIER" button is at the bottom right.


Screenshot 2: The "Nom de l'organisation" dropdown menu is open, showing a list of options: "AIRSEFAM", "Sous org JSL", "ADOR", "Organisation test", "Sefam US", "Test vbastien", "Sefam UK", "PREFIXE TEST", "3e sous-orga", and "ACME JP". A mouse cursor is pointing at "AIRSEFAM".

Screenshot 3: The "Nom de l'organisation" field now displays "Sous org JSL". A red warning banner at the bottom states: "ATTENTION : VOUS ÊTES SUR LE POINT DE CHANGER D'ORGANISATION ET CETTE ACTION EST IRRÉVERSIBLE. UNE FOIS EFFECTUÉE, VOUS NE POURREZ PAS REVENIR À UNE ORGANISATION PARENTE." The blue "MODIFIER" button remains at the bottom.

Tableau de bord


Résumé de l'observance des patients

- Le premier camembert (nouveaux patients) représente la répartition des patients en fonction de leur observance sur les 3 derniers mois.
- Le second (long cours) représente la répartition de l'observance des patients qui sont au-delà de la période de suivi initiale.

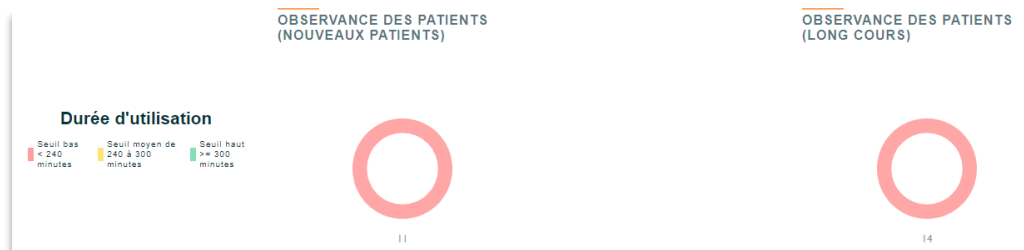

Résumé de l'efficacité du traitement - IAH

- Le premier camembert (nouveaux patients) représente la répartition des patients en fonction du nombre d'événements résiduels sur les 3 derniers mois.
- Le second (long cours) représente la répartition des patients en fonction du nombre d'événements résiduels des patients qui sont au-delà de la période de suivi initiale.

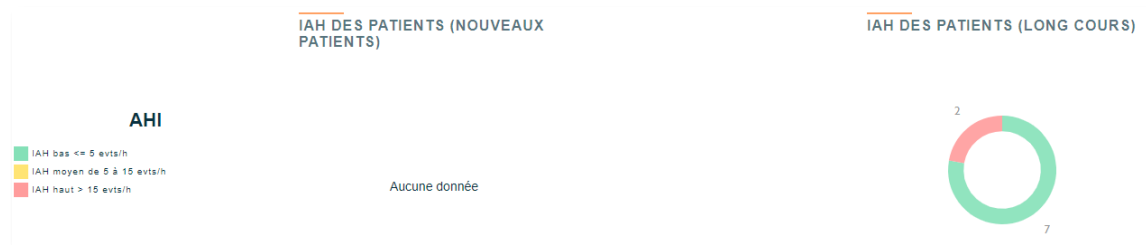

Il est ainsi possible en un coup d'œil de suivre l'adaptation des patients et le bon suivi du traitement
Un simple clic sur les graphiques permet d'afficher la liste des patients qui ne sont pas observants pour les contacter par


Navigation générale

Menu principal

Le menu principal à gauche permet de faire apparaître des sous menu donnant accès aux différentes fonctionnalités de l'interface SEFAM Connect. Ce menu est fonction des types d'utilisateurs et des droits accordés à l'utilisateur qui est connecté à l'interface. Voici, l'exemple du menu des comptes PSAD :

- Profil de l'utilisateur
- Déconnexion
- Tableau de bord
- Patients
- Machines
- Historique des réglages
- Utilisateurs
- Docteurs
- Paramètres d'analyses
- Organisations


Un clic sur le logo « SEFAMCONNECT » permet de revenir à la page d'accueil avec les tableaux de bord et un clic sur « Réduire le menu » plie le menu.

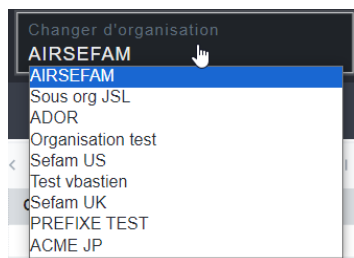



Changer d'organisation : La liste déroulante avec le nom de l'organisation en haut à droite permet de changer d'organisations parmi votre hiérarchie. Votre compte ne sera pas déplacé dans l'organisation sélectionnée, mais il permet de naviguer dans chaque menu en tant qu'administrateur de l'organisation sélectionnée, ainsi que modification des informations.

La pagination et filtres

La pagination des listes permet de choisir le nombre d'éléments à afficher par page (10, 20, 50) de se rendre directement à une page précise et indique les éléments en cours de consultation sur le nombre total d'éléments. Les flèches « <, > » servent à naviguer entre les différents pages.

Utilisateurs: + 							
ELEMENTS PAR PAGE : 20 < < [1 À 20] SUR 44 RÉSULTAT(S) > > 							
Nom ▼	Prénom	Organisation	Groupe d'utilisateurs	Identifiant	Téléphone	Dernière connexion	Statut

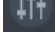Les listes peuvent être filtrées afin de faciliter les recherches en cliquant sur  en haut à droite de la liste. Les options de filtrage dépendent de la liste en cours de consultation. Il est également possible de paramétrer les colonnes de la liste par ce bouton. Certaines listes ont la colonne « actions » qui permet d'apporter une modification sur l'élément de la ligne sélectionnée (e.g. édition d'information, déplacement de machine, détachement/ attachement des patients, etc.), le contenu des actions dépend de la liste.


S'il est possible d'ajouter un élément à une liste et si l'utilisateur connecté à les droits le symbole  apparaît à côté du symbole des paramètres d'affichage, un clic dessus ouvre la fenêtre d'ajout.

Certaines colonnes ont la possibilité de trier les éléments par l'ordre croissant/décroissant par un clic dessus. La colonne triée est indiquée avec le triangle



Prénom	Nom	Date de naissance	Durée de suivi ▼	N/S machine	Type de machine	Date début traitement	Obs. moy. 7j
Michèle	Demo	15/08/1950	3 mois 27 jours		-	11/10/2023	
Sébastien	Demo	24/02/1963	7 mois 4 jours		-	04/07/2023	
Patient	Demo	01/04/2023	9 mois 15 jours		-	24/04/2023	00:00
Demo	Demo	23/01/1965	10 mois 16 jours	1260R22200206	S.Box Duo ST	23/03/2023	00:00
Jules	Demo	01/01/1970	10 mois 19 jours		-	20/03/2023	
Jean	Demo	01/03/1985	11 mois 2 jours		-	07/03/2023	
Xavier	Demo	25/12/1970	1 an 1 mois 24 jours		-	14/12/2022	
Hugues	Demo	30/01/1966	1 an 10 mois 23 jours		-	16/03/2022	

Organisations

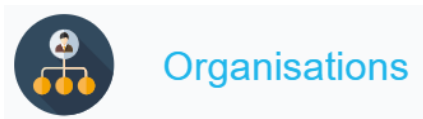


En plus de l'organisation principale, il est possible de créer des sous organisations gérant elles-mêmes leur parc de machines et leurs patients.

La liste des organisations est représentée sous forme d'arborescence, une profondeur de 3 sous-organisations peut être définie avec autant d'organisations possible que voulue pour chaque niveau de profondeur.


Il est ainsi possible de gérer indépendamment différents pôles. Seul l'administrateur de l'organisation principale à une vision d'ensemble.

Les administrateurs des sous organisations ne voient que les organisations inférieures à leur propre niveau.

Organisations: ⌵ ⌴ ⌶										
⏪ < [1 À 11] SUR 11 RÉSULTAT(S) > ⏩										
ID	Organisation	Description	Fuseau horaire	Téléphone	Adresse	Code postal	Ville	Code pays	Site web	Actions
366	AIRSEFAM		Europe/Paris	03.83.44.85.99	10 Allée Pelletier Doisy	54600	Villers les Nancy	FR	WWW.AIRSEFAM.COM	⋮
515	• Sous org JSL	Description	Europe/Paris					FR		⋮
629	• • ADOR		Europe/Paris					FR		⋮
575	• Sous-orga N1	N1	Europe/Paris					FR		⋮
606	• • Sefam US		America/Eirunepe					FR		⋮
806	• • Sous-orga N2	N2	Indian/Reunion					FR		⋮
807	• • • Sous-orga N3	N3	Indian/Mayotte					FR		⋮
577	• Test vbastien		Europe/Paris					FR		⋮
592	• Sefam UK		Europe/Dublin					IE		⋮
795	• • PREFIXE TEST		Australia/Adelaide	000				AU		⋮
756	• ACME JP	Pour test redirection JP	Asia/Tokyo					JP		⋮
⏪ < [1 À 11] SUR 11 RÉSULTAT(S) > ⏩										

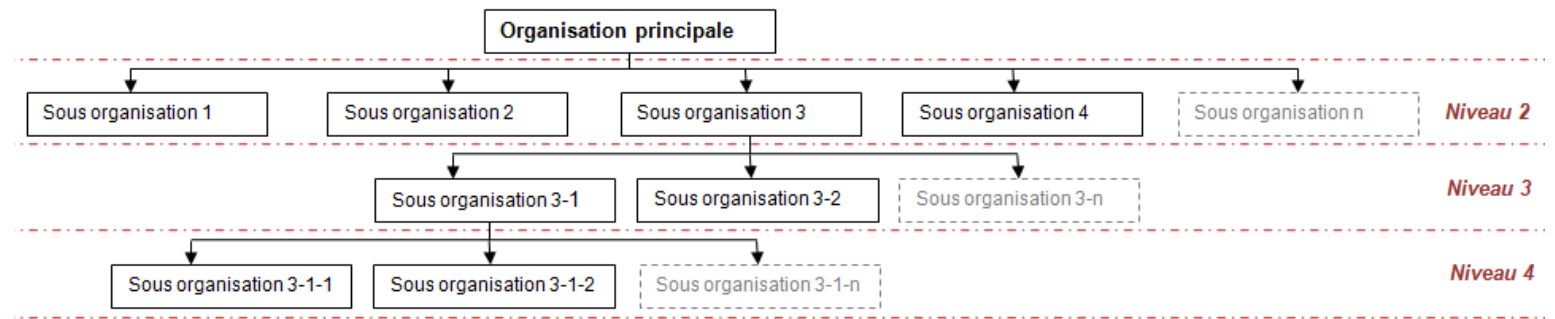

Actions : ajout d'une sous-organisation, modification de l'organisation

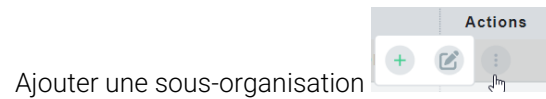

×

AJOUTER UNE SOUS-ORGANISATION

ORGANISATION ACTUELLE : AIRSEFAM

Nom de la nouvelle organisation*

Description

0/100

Fuseau horaire*

Sélectionnez votre fuseau horaire

Pays*

Sélectionnez votre pays

Adresse

Code postal

Ville

Téléphone

Site internet

AJOUTER UNE SOUS-ORGANISATION

×

MODIFIER UNE ORGANISATION

Nom de l'organisation*

AIRSEFAM

Description

0/100

Fuseau horaire*

Europe/Paris

Pays*

France

Adresse

Code postal

54600

Ville

Villers les Nancy

Téléphone

03.83.44.85.99

Site internet

WWW.AIRSEFAM.COM

MODIFIER UNE ORGANISATION

Le formulaire permettant d'ajouter une sous organisation. Le fuseau horaire permet d'ajuster le calendrier de nuit par rapport au décalage horaire. Il est possible d'ajouter un logo qui apparaîtra sur la page d'accueil de SEFAM Connect ainsi que lors de l'édition des rapports.

Recherche

Configurer la liste

ID de l'organisation

Nom de l'organisation

Export API

☐ Export API

Export récursif

☐ Export récursif

Export CSV

☐ None
☐ V.1
☐ V.2
☐ V.1 + V.2
☐ V.1[ZIP]
☐ V.1[ZIP] + V.2
☐ V.3

RÉINITIALISER LES FILTRES

Recherche : Il est possible d'appliquer un filtre, en haut à droite de la liste, pour rechercher l'organisation voulue.

- ID de l'organisation
 - Nom de l'organisation
- Configuration des exports des données
- Export API
 - Export récursif (si ça exporte les données de ses sous-organisations aussi ou pas)
 - Export CSV (none, V.1, V.2, V.1+V.2, V.1 ZIP, V.1 ZIP + V.2, V.3)

Le type d'export : configuration faite par la SEFAM

Il existe différents formats et moyens de réaliser un export. Pour cela, il est nécessaire de contacter l'entreprise Sefam pour pouvoir réaliser la configuration.

Les colonnes disponibles :

Recherche

Configurer la liste

Colonnes à afficher

☒ ID
☒ Organisation
☒ Description
☒ Fuseau horaire
☒ Téléphone
☒ Adresse
☒ Code postal
☒ Ville
☒ Code pays
☒ Site web
☐ Export CSV
☐ Export XML
☐ Export récursif
☐ Export API
☐ Actions

TOUT AFFICHER

- ID
- Organisation
- Description
- Fuseau horaire
- Téléphone
- Adresse
- Code postal
- Ville
- Code pays
- Site web
- Export CSV
- Export XML
- Export recursive
- Export API
- Actions

Menu Patients



Patients

En cliquant sur le menu Patient, il affiche la liste des patients qui sont dans l'organisation avec l'information de l'observance. Les colonnes sur l'observance disposent également d'un code couleur permettant de faciliter la visualisation de l'évolution de l'efficacité du traitement et ainsi décider si le traitement est toujours adapté au patient.


Patients: ↓ + ⌵ ⌴

ELEMENTS PAR PAGE : 20 |< < [1 À 12] SUR 12 RÉSULTAT(S) > >|

Prénom	Nom ▼	Date de naissance	Durée de suivi	Organisation	Type de machine	Date début traitement	Obs. moy. 1m	IAH moy. 1m	% temps > fuite lim. 1m	Obs. moy. 3m	IAH moy. 3m	% temps > fuite lim. 3m	Actions
Demo	Demo	04/02/1986	11 mois 2 jours	Sefam UK	-	07/03/2023							
Xavier	Demo	25/12/1970	1 an 1 mois 24 jours	Sefam UK	-	14/12/2022							
Sébastien	Demo	24/02/1963	7 mois 4 jours	Sefam UK	-	04/07/2023							
Jules	Demo	01/01/1970	10 mois 19 jours	Sefam UK	-	20/03/2023							
Patrick	Demo	01/02/1973	2 ans 7 mois 8 jours	Sefam UK	S.Box	30/06/2021	00:00			02:32	0.7	0.7	
Hugues	Demo	30/01/1966	1 an 10 mois 23 jours	Sefam UK	-	16/03/2022							
Timothée	Demo	17/10/1950	2 ans 4 mois 6 jours	Sefam UK	-	01/10/2021							
Patient	Demo	01/04/2023	9 mois 15 jours	Sefam UK	S.Box	24/04/2023	02:08	0.3	1	01:42	0.8	1.6	
Honoré	Demo	06/12/1978	10 mois 26 jours	Sefam UK	S.Box	13/03/2023	00:00			00:00	18	20.4	
Michèle	Demo	15/08/1950	3 mois 27 jours	Sefam UK	-	11/10/2023							
Demo	Demo	23/01/1965	10 mois 16 jours	Sefam UK	S.Box Duo ST	23/03/2023	00:00			00:00	0	0	
Jean	Demo	01/03/1985	11 mois 2 jours	Sefam UK	-	07/03/2023							


ELEMENTS PAR PAGE : 20 |< < [1 À 12] SUR 12 RÉSULTAT(S) > >|

Le bouton  permet d'ajouter un nouveau patient.

Le bouton  permet de télécharger la liste des patients avec l'observance des derniers 30 jours des patients dans la même hiérarchie (organisation + sous organisations) en format CSV.

Un clic sur le nom du patient donne l'accès au calendrier de nuit. À partir de cette page, vous pouvez accéder aux différents sous-menus concernant le traitement du patient à l'aide des onglets affichés :

- Profile du patient
- Calendrier de nuit
- Profile d'évolution du traitement
- Objets connectés
- Rapport
- Réglages à distance
- Courbe à 1 min

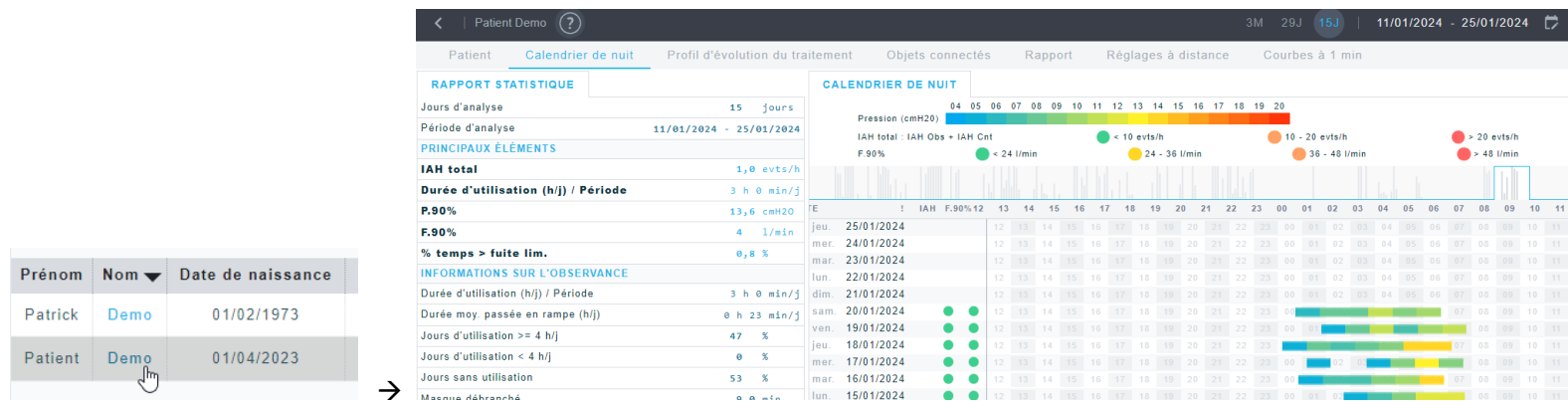

Prénom	Nom ▼	Date de naissance
Patrick	Demo	01/02/1973
Patient	Demo	01/04/2023

→

Les colonnes disponibles :

Recherche

Configurer la liste

Colonnes à afficher

☐ ID

☐ Statut

☐ ID personnalisé

☒ Prénom

☒ Nom

☒ Date de naissance

☒ Objets connectés

☒ Durée de suivi

☒ Organisation

☐ N/S machine

☒ Type de machine

☐ Date début traitement

☒ Obs. moy. 7j

☒ IAH moy. 7j

☒ % temps > fuite lim. 7j

☒ Obs. moy. 1m

☒ IAH moy. 1m

☒ % temps > fuite lim. 1m

☒ Obs. moy. 3m

☒ IAH moy. 3m

☒ % temps > fuite lim. 3m

☐ Obs. moy. 6m

☐ Obs. moy. 9m

☒ Obs. moy. 12m

☒ IAH moy. 12m

☒ % temps > fuite lim. 12m

☐ Actions

TOUT AFFICHER

- ID
- Statut
- ID personnalisé
- Prénom
- Nom
- Date de naissance
- Objets connectés
- Durée de suivi
- Organisation
- Numéro de série de la machine
- Type de machine
- Date du début de traitement
- Observance/IAH/% temps sur différentes périodes : 7j, 1m, 3m, 6m, 9m, 12m
- Actions

Critères de recherche :

Recherche Configurer la liste

Prénom

Nom

ID

ID personnalisé

N° de série machine

Nom de l'organisation

Observance

Seuils d'observance
Tous

Période d'observance
Tous

Modèles de machine

☐ MO+

☐ DreamStar Auto

☐ DreamStar Info

☐ DreamStar Duo

☐ DreamStar Duo ST

☐ EcoStar Auto

☐ EcoStar Info

☐ S.Box Auto

☐ S.Box Info

☐ S.Box Duo

☐ S.Box Duo ST

Statuts du patient

☐ Actif

☐ Inactif

☐ Archivé

Patients Disponibles

☐ Disponibles

RÉINITIALISER LES FILTRES

- Prénom
- Nom
- ID
- ID personnalisé
- Numéro de série de la machine
- Nom de l'organisation
- Observance
 - Seuils d'observance (tous, en dessous de Xh, Entre Xh et Yh, Au-dessus de Yh)
 - Période d'observance (tous, 7 jours, 6 mois, 9 mois, 12 mois)
- Modèles de machine
- Statut du patient par rapport à son traitement (actif, inactif, archivé)
- Date du début de traitement
- Patients disponibles (=patients détachés d'organisation)

Observance

Seuils d'observance

Tous

Tous

En dessous de 4h

Entre 4h et 5h

Au-dessus de 5h

Période d'observance

Tous

Tous

7 jours


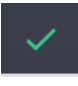
6 mois


9 mois

12 mois

Export de la liste des patients :




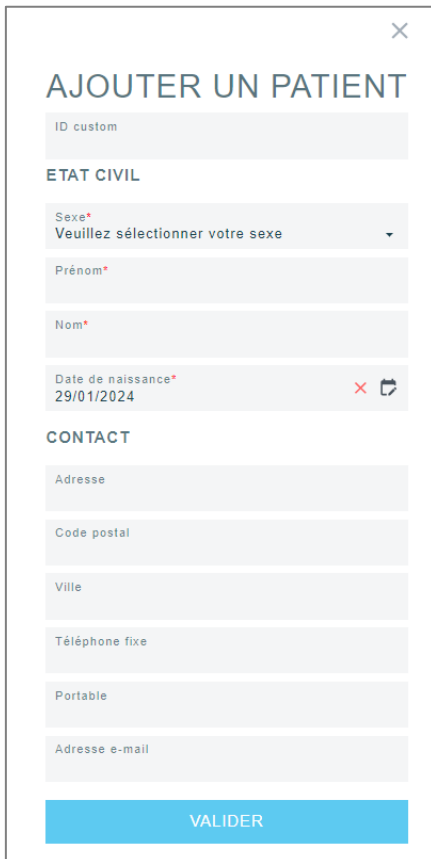
 →  pendant 5 min on ne peut pas retélécharger la liste

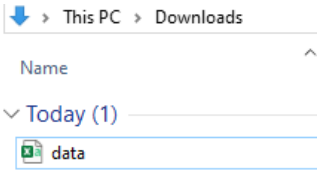

LASTNAME	FIRSTNAME	BIRTHDATE	CUSTOM ID	ORGANIZATION NAME	DEVICE INSTALLATION DATE	DEVICE SERIAL NUMBER	AVERAGE AHI OF LAST 30 DAYS	AVERAGE COMPLIANCE OF LAST 30 DAYS	AVERAGE % TIME SPENT > LEAK LIMIT OF LAST 30 DAYS	LAST SESSION DATE	LAST HEARTBEAT DATE
Auto test		1200R19205491	12/31/2022	AIRSEFAM	9/1/2023 12:00	1200R19205491				12/15/2023 14:24	12/18/2023 9:51
Case	Attaché	1260R22050033	12/1/2023	AIRSEFAM	12/20/2023 12:00	1200R19468450	0		0	1/10/2024 17:53	1/10/2024 15:47
DUO ST		1260R22050033	1/1/2020	AIRSEFAM	3/1/2022 12:00	1260R22050033				12/12/2023 15:19	12/14/2023 8:57
DuoST démo	Lisa	1184R15030162	11/1/2004	AIRSEFAM	1/1/2023 12:00	1260R22361556					
Dupont	Martin	1184R15030162	3/8/1979	AIRSEFAM	8/24/2023 12:00	1180R15150571				9/11/2023 9:20	9/11/2023 13:52
EcoStar test		1184R15030162	9/1/2012	AIRSEFAM	9/11/2023 12:00	1184R15030162				9/14/2023 15:19	9/18/2023 13:37
FarmMC	Raphou901	1265R23380043	12/1/2023	AIRSEFAM	12/1/2023 12:00	1265R23380043					
FarmMC	Raphou301	1265R23380046	12/1/2023	AIRSEFAM	12/1/2023 12:00	1265R23380046					
FarmMC	Raphou907	1265R23380036	12/1/2023	AIRSEFAM	12/1/2023 12:00	1265R23380036					
FarmMC	Raphou906	1265R23380044	12/1/2023	AIRSEFAM	12/1/2023 12:00	1265R23380044					
FarmMC	Raphou905	1265R23380024	12/1/2023	AIRSEFAM	12/1/2023 12:00	1265R23380024					
FarmMC	Raphou903	1265R23380047	12/1/2023	AIRSEFAM	12/1/2023 12:00	1265R23380047					
FarmMC	Raphou902	1265R23380045	12/1/2023	AIRSEFAM	12/1/2023 12:00	1265R23380045					

Ajout d'un nouveau patient :

Pour ajouter un nouveau patient, cliquez sur  au-dessus de la liste des patients, puis renseignez les informations dans le formulaire. Seuls les champs avec une * sont obligatoires (nom, prénom, sexe, date de naissance).



- Custom ID
- Sexe*
- Prénom*
- Nom*
- Date de naissance*
- Adresse
- Code postal
- Ville
- Téléphone fix
- Portable
- Adresse email

Une fois que le patient est correctement créé, vous arrivez sur le profil du patient. Ensuite, pour le suivi des patients à distance, il est nécessaire de lui ajouter un traitement et associer une machine dans les prochaines étapes.

Principe : L'association se déroule en 2 étapes : « l'ajout d'un traitement » et « l'installation d'une machine ».

Nouveau Patient

Patient

Calendrier de nuit

Profil d'évolution du traitement

Objets connectés

Rapport

Réglages à distance

Courbes à 1 min

IDENTITÉ

Nom

Patient

Prénom

Nouveau

Nom de jeune fille

-

Genre

Homme

Date de naissance

01/02/1990

COORDONNÉES

Adresse mail

-

Organisation

AIRSEFAM

Téléphone

-

Téléphone Mobile

-

Identifiant SEFAM Access

-

INFORMATIONS CLINIQUES

Poids

-

Taille

-

IAH

-

IAH obstructif

-

IAH central

-

Echelle d'Epworth

-

Commentaires

-

TRAITEMENTS

+ Ajouter un traitement

Date de début de traitement

Date de fin de traitement

Actions

Aucun résultat

MÉDECINS

+ Ajouter un médecin

Nom

Identifiant RPPS

Adresse e-mail de contact

Actions

Aucun résultat

MACHINES

+ Attacher une machine

Numéro de série

Modèle

Date d'installation

Installation par


Date de retrait

Retrait par

Actions

Aucun résultat

1. Ajout d'un traitement

Appuyez sur **+ Ajouter un traitement** dans la section « TRAITEMENTS », sélectionner la date de début du traitement en cliquant sur le calendrier , puis appuyer sur le bouton « NOUVEAU TRAITEMENT » pour valider.

Ajouter un traitement

Date de début de traitement*

01/02/2024

NOUVEAU TRAITEMENT

TRAITEMENTS

+ Ajouter un traitement

Date de début de traitement


Date de fin de traitement


Actions

01/02/2024 12:00

-

2. Installation d'une machine

Appuyez sur **+ Attacher une machine** dans la section « MACHINES », sélectionner la date d'installation de la machine en cliquant sur le calendrier  (la même date que la date de début du traitement si c'est sa première machine), et saisissez le numéro de série de la machine. (En entrant les premiers caractères du numéro de série de l'appareil dans le champ, une liste apparait avec les machines disponibles dans l'organisation du patient.)

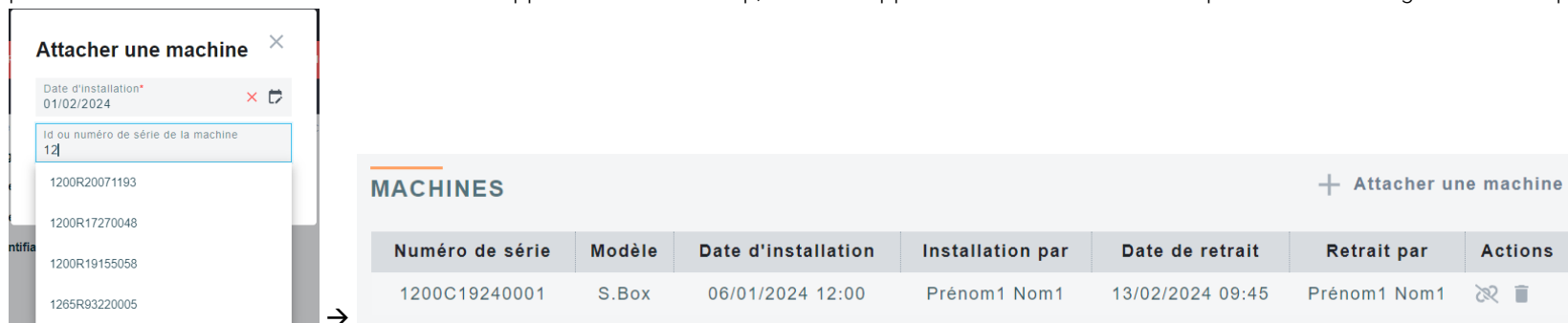

The screenshot shows a modal titled "Attacher une machine" with a close button (X). It contains a "Date d'installation*" field with a calendar icon and a value of "01/02/2024". Below it is a search field "Id ou numéro de série de la machine" with a value of "12". A dropdown list shows four machine IDs: "1200R20071193", "1200R17270048", "1200R19155058", and "1265R93220005". To the right, the "MACHINES" table is visible, showing a list of machines with columns: "Numéro de série", "Modèle", "Date d'installation", "Installation par", "Date de retrait", "Retrait par", and "Actions". The first row shows "1200C19240001", "S.Box", "06/01/2024 12:00", "Prénom1 Nom1", "13/02/2024 09:45", "Prénom1 Nom1", and action icons.




Il n'est pas possible d'associer une machine à un patient :

→ S'il la date d'installation sélectionnée est antérieure à la date du retrait de la machine du patient à qui la machine a dernièrement été installée.

→ S'il la machine ne se trouve pas dans la même organisation que le patient (machine introuvable). Dans ce cas-là, il faut contacter l'administrateur de votre organisation-mère (ou Sefam, si vous êtes dans l'orga-mère) pour demander le déplacement de la machine.

❖ Retrait de machine /changement de machine

Si l'appareil est retiré au patient, mais que ce dernier poursuit son traitement, cliquer sur le crayon  pour indiquer une date de retrait.

En cas de changement de machines aussi, appuyez sur le crayon  pour retirer d'abord la machine. Ensuite, attachez une deuxième machine avec la même procédure que la première machine.

Détacher une machine ✕

Date de retrait* ✕

05/02/2024 12:00

DÉTACHER LA MACHINE

→ + Attacher une machine →

Attacher une machine ✕

Date d'installation* ✕

05/02/2024

Id ou numéro de série de la machine

1200R17270048

ATTACHER UNE MACHINE

MACHINES + Attacher une machine

Numéro de série	Modèle	Date d'installation	Installation par	Date de retrait	Retrait par	Actions
1200C20120001	S.Box	13/02/2024 11:30	Prénom1 Nom1	-	-	
1200C19240001	S.Box	06/01/2024 12:00	Prénom1 Nom1	13/02/2024 09:45	Prénom1 Nom1	

❖ Suppression de machine

Vous avez la possibilité d'annuler l'installation d'un dispositif chez un patient par le symbole . Cela aura pour effet de supprimer l'historique d'installation de ce dispositif et ainsi supprimer les données liées chez ce patient.

MACHINES

+ Attacher une machine

Numéro de série	Modèle	Date d'installation	Installation par	Date de retrait	Retrait par	Actions
1200C20120001	S.Box	13/02/2024 11:30	Prénom1 Nom1			<div style="background-color: #00a0e3; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block;">Annuler l'attache- ment machine</div>
1200C19240001	S.Box	06/01/2024 12:00	Prénom1 Nom1	13/02/2024 09:45	Prénom1 Nom1	

❖ Fin de traitement :

Si le traitement du patient est arrêté, il est nécessaire de déclarer une date de désappareillage. Pour ce faire, cliquez sur l'icône du traitement en cours. Dans la fenêtre qui s'ouvre, indiquez la date de retrait en cliquant sur le calendrier et saisissez un motif et sélectionnez ensuite si le patient doit être archivé (traitement arrêté) ou rendu inactif (traitement en pause). Le fait de désappareiller un patient met automatiquement à jour les colonnes 'Date de retrait' et 'Retrait par' du tableau de la liste du matériel.

Modification du traitement

Modifier le traitement

Date de début de traitement*

01/02/2024

MODIFIER LE TRAITEMENT

Terminer le traitement

Date de fin de traitement*

09/02/2024



Raison de la fin du traitement*

Arrêt

Type de fin du traitement

Inactif




TERMINER LE TRAITEMENT

TRAITEMENTS			+ Ajouter un traitement
Date de début de traitement	Date de fin de traitement	Actions	
01/02/2024 12:00	09/02/2024 12:00	 	

MÉDECINS

+ Ajouter un médecin

Nom	Identifiant RPPS	Adresse e-mail de contact	Actions
Aucun résultat			

MACHINES							+ Attacher une machine
Numéro de série	Modèle	Date d'installation	Installation par	Date de retrait	Retrait par	Actions	
1200R20071193	S.Box	05/02/2024 12:00	USER PSAD	09/02/2024 12:00	USER PSAD	 	
1200R20071193	S.Box	01/02/2024 12:00	USER PSAD	05/02/2024 12:00	USER PSAD	 	

Ajout de docteurs :

Comme vu précédemment il est possible de créer un utilisateur externe à l'organisation tel que le médecin prescripteur du patient. Une fois ce médecin déclaré un accès spécifique peut lui être accordé afin qu'il consulte à distance et à tout moment les données concernant son patient telles que l'observance ou l'efficacité du traitement.

Bien entendu il ne pourra visualiser que les des patients pour lesquels il est déclaré comme médecin prescripteur.

Appuyez sur **+ Ajouter un médecin** dans la section « MÉDECINS», tapez les premières lettres du nom du médecin ou son numéro RPPS pour le faire apparaître puis cliquez dessus pour l'associer au patient. Afin de trouver des médecins qui ne sont pas encore liés à votre organisation, coupez le switch vert « Uniquement les médecins déjà rattachés ».



MÉDECINS				+ Ajouter un médecin
Nom	Identifiant RPPS	Adresse e-mail de contact	Actions	
Doctor 1 (PRESCRIBER)	user-12360	demo.dr1@test.test		

Si le médecin que vous cherchez ne se trouve pas encore sur SEFAM Conenct, vous pouvez créer son compte médecin par le bouton « CRÉATION D'UN MÉDECIN ».



The image shows a modal window titled "Création d'un médecin" with a close button (X) in the top right corner. It contains four input fields: "Adresse e-mail*", "Nom*", "Prénom*", and "Type de médecin*" (a dropdown menu currently showing "Autre"). At the bottom, there are two buttons: a red "ANNULER" button and a blue "CRÉATION D'UN MÉDECIN" button.

Création d'un médecin X

Adresse e-mail*

Nom*

Prénom*

Type de médecin*
Autre ▼

ANNULER CRÉATION D'UN MÉDECIN

Complétez les champs (adresse email, nom, prénom, type de médecin (prescripteur/autre) et appuyez sur « CRÉATION D'UN MÉDECIN ».



Le médecin va ainsi recevoir un mail de SEFAM Connect pour procéder la création du compte. Après la validation du compte, il pourra se connecter à l'interface SEFAM Connect et consulter l'observance et l'efficacité du traitement de ses patients, bien entendu il ne pourra visualiser que les des patients pour lesquels il est déclaré comme médecin prescripteur.

« Actions » :

Actions

- Détachement et attachement du patient ... Pour transférer un patient à une autre organisation (au cas où le patient déménage dans une autre ville et/ou va être suivi par une autre agence, etc.)
- Calcul de l'observance ... pour recalculer et mettre à jour l'observance sur la liste

➤ Détachement du patient :



ELEMENTS PAR PAGE : 20 < [1 À 3] SUR 3 RÉSULTAT(S) >								
Prénom	Nom ▼	Date de naissance	Durée de suivi	Organisation	Obs. moy. 3m	IAH moy. 3m	% temps > fuite lim. 3m	Actions
Patrick	Demo	01/02/1973	2 ans 7 mois 8 jours	Sefam UK	02:29	0.7	0.6	
Honoré	Demo	06/12/1978	10 mois 26 jours	Sefam UK	00:00	18	Détacher ce patient de votre organisation	
Demo	Demo	23/01/1965	10 mois 16 jours	Sefam UK	00:00	0	0	

Détacher le patient de son organisation

Êtes-vous sûr de vouloir détacher ce patient de son organisation ?

ANNULER
DÉTACHER

Attention : Détachement du patient retire la machine attachée au patient.

ELEMENTS PAR PAGE : 20 < [1 À 2] SUR 2 RÉSULTAT(S) >								
Prénom	Nom ▼	Date de naissance	Durée de suivi	Organisation	Obs. moy. 3m	IAH moy. 3m	% temps > fuite lim. 3m	Actions
Patrick	Demo	01/02/1973	2 ans 7 mois 8 jours	Sefam UK	02:29	0.7	0.6	
Demo	Demo	23/01/1965	10 mois 16 jours	Sefam UK	00:00	0	0	

➤ Attachement du patient :

Depuis dans une autre organisation de la même hiérarchie. La manipulation doit être faite par un administrateur de l'autre orga ou en utilisation la fonction de changer d'organisation en haut à droite. Pour afficher les patients disponibles (=détachés), appliquer le filtre « patients disponibles » dans les filtres puis attacher le patient.

Patients | Filtres actifs: Disponibles AVAILABLE

ELEMENTS PAR PAGE : 20 [1 À 7] SUR 7 RÉSULTAT(S)

Prénom	Nom	Date de naissance	Durée de suivi	Organisation	Obs. moy. 3m	IAH moy. 3m	% temps > fuite lim. 3m	Actions
		20/05/1981	-					
		01/03/2000	2 ans 10 mois 6 jours					
Honoré	Demo	06/12/1978	10 mois 26 jours					
		15/07/1977	5 ans 8 mois 7 jours					
		03/07/2023	6 mois 29 jours					
		01/10/1968	3 ans 1 mois 5 jours		00:00			
		07/09/2005	4 mois 18 jours					

ELEMENTS PAR PAGE : 20 [1 À 7] SUR 7 RÉSULTAT(S)

☐ MO+
☐ DreamStar Auto
☐ DreamStar Info
☐ DreamStar Duo
☐ DreamStar Duo ST
☐ EcoStar Auto
☐ EcoStar Info
☐ S.Box Auto
☐ S.Box Info
☐ S.Box Duo
☐ S.Box Duo ST

Statuts du patient
☐ Actif
☐ Inactif
☐ Archivé

Patients Disponibles
☒ Disponibles

RÉINITIALISER LES FILTRES

Honoré	Demo	06/12/1978	10 mois 26 jours							Attacher ce patient à une organisation
--------	------	------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

Attacher le patient à votre organisation
Étes-vous sûr de vouloir attacher ce patient à votre organisation ?


ANNULER
ATTACHER

En enlevant la coche sur le filtre « disponibles » on peut confirmer que le patient a bien été attaché à l'organisation AIRSEFAM

➤ Calcul de l'observance

Le calcul de l'observance est utile lorsque plusieurs paramètres sont modifiés tels que : l'inclusion ou l'exclusion de certains évènements, ainsi que des durées d'analyse.

Prénom	Nom ▼	Date de naissance	Durée de suivi	Type de machine	Obs. moy. 1m	IAH moy. 1m	% temps > fuite lim. 1m	Obs. moy. 3m	IAH moy. 3m	% temps > fuite lim. 3m	Actions
Patient	Demo	01/04/2023	9 mois 15 jours	S.Box	02:08	0.3	1	01:42	0.3		Calculer l'observance de ce patient

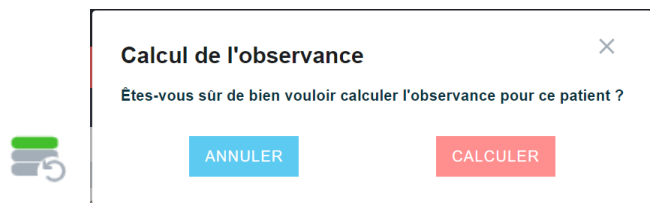

Onglet « Profil du patient »

Dans l'onglet « Patient », vous pouvez visualiser et éditer les informations concernant le patient et son traitement. L'ajout de traitement et l'ajout de machine sont indispensables pour suivre le traitement de patient à distance.

- **Identité** : nom, prénom, nom de jeune fille (pour les femmes), genre, date de naissance
- **Coordonnées** : adresse mail, organisation (indication automatique), téléphone mobile, identifiant SEFAM Access
- **Informations cliniques** : poids, taille, IAH, IAH obstructif, IAH central, Echelle d'Epworth, commentaires
- **Traitements** : date de début de traitement / actions : ajout, suppression
- **Médecins** : nom, Identifiant RPPS, adresse email de contact / actions : ajout, suppression
- **Machines** : numéro de série, modèle (indication automatique), date d'installation, date de retrait / actions : ajout, suppression

Patient Demo ?

Patient

Calendrier de nuit

Profil d'évolution du traitement

Objets connectés

Rapport

Réglages à distance

Courbes à 1 min

IDENTITÉ

Nom

Demo

Prénom

Patient

Nom de jeune fille

-

Genre

Homme

Date de naissance

01/04/2023

COORDONNÉES

Adresse mail

-

Organisation

Sefam UK

Téléphone

-

Téléphone Mobile

-

Identifiant SEFAM Access

anonym-alexandre4057555@sefam-medical.com

INFORMATIONS CLINIQUES

Poids

-

Taille

-

IAH

-

IAH obstructif

-

IAH central

-

Echelle d'Epworth

-

Commentaires

-

TRAITEMENTS

+ Ajouter un traitement

Date de début de traitement	Date de fin de traitement	Actions
24/04/2023 12:00	-	<div></div> <div></div>

MÉDECINS

+ Ajouter un médecin

Nom	Identifiant RPPS	Adresse e-mail de contact	Actions
Doctor 1 (PRESCRIBER)	user-12360	demo.dr1@test.test	<div></div>
Doctor 2	user-13104	demo.dr2@test.test	<div></div>

MACHINES

+ Attacher une machine


Número de série	Modèle	Date d'installation	Installation par	Date de retrait	Retrait par	Actions
1200R21063954	S.Box	24/04/2023 12:00	-	-	-	<div></div> <div></div>

Onglet « Calendrier de nuit »

Sur cette page, composée du rapport statistique et du calendrier de nuit, nous retrouvons l'ensemble des informations essentielles au suivi du traitement du patient, notamment la durée d'utilisation pour chaque nuit, les différents réglages utilisés par la machine.

Le calendrier de nuit montre les séances avec couleurs basées sur la pression moyenne par heure et les indicateurs de l'IAH et de la fuite 90%. Par ailleurs, le symbole d'engrenage signifie qu'il y a eu une mise à jour de réglages de la machine sur ce jour-là. En mettant le curseur dessus, vous pouvez voir quels réglages ont été appliqués à la machine.

Pour changer la période d'analyse, cliquez sur le symbole de calendrier situé en haut à droite. Vous avez également la possibilité de sélectionner une période avec les trois boutons de période par défaut (3M, 29J, 15J) ou avec le slider au-dessus du calendrier de nuit.

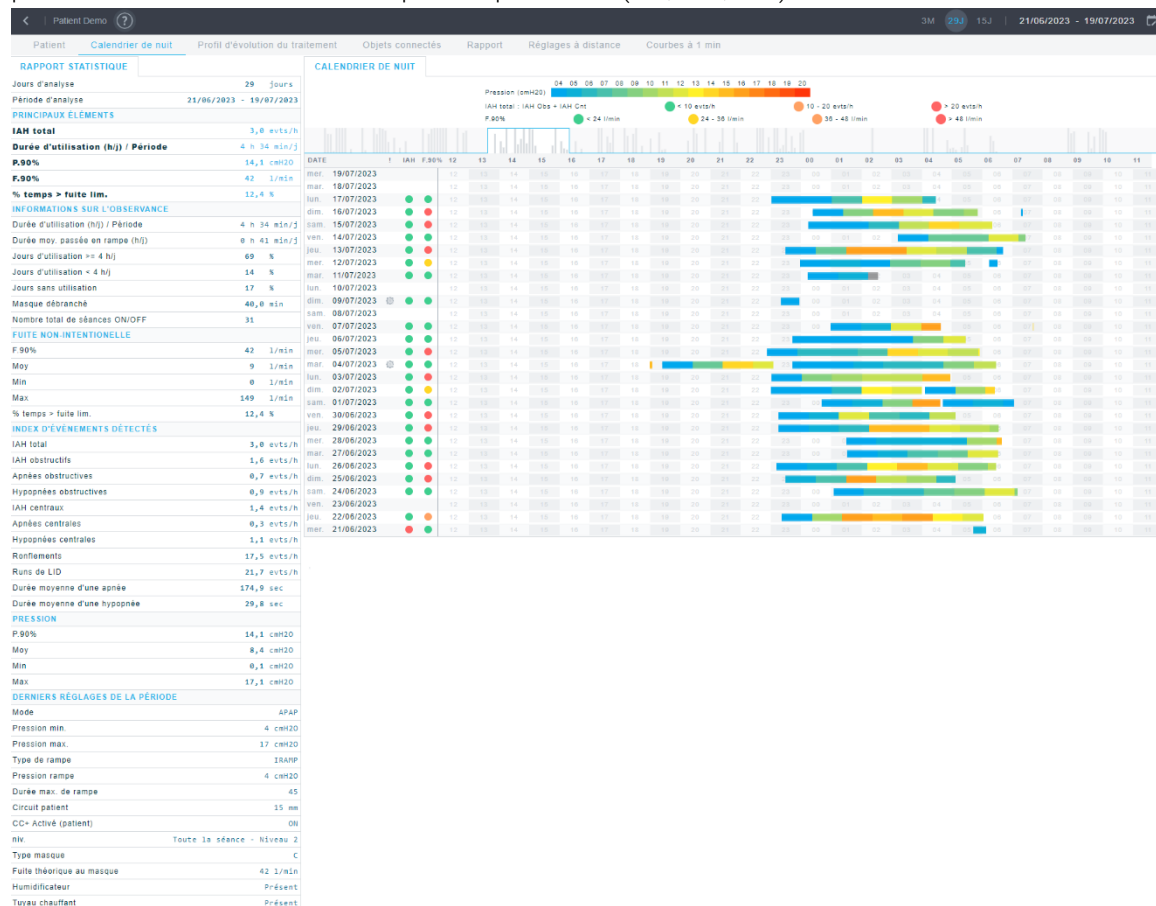

DATE			
jeu. 20/09/2023	Mode		APAP
mer. 27/09/2023	Pression min.		40 cmH2O
mar. 26/09/2023	Pression max.		140 cmH2O
lun. 25/09/2023	Type de rampe		IRAMP
dim. 24/09/2023	Pression rampe		40 cmH2O
sam. 23/09/2023	Durée max. de rampe		45
ven. 22/09/2023	Circuit patient		15 mm
jeu. 21/09/2023	CC+ Activé (patient)		ON
mer. 20/09/2023	niv.		Toute la séance - Niveau 2
mar. 19/09/2023	Type masque		C
lun. 18/09/2023	Type masque		42
dim. 17/09/2023	Humidificateur		Présent
sam. 16/09/2023	Tuyau chauffant		Présent
ven. 15/09/2023			
jeu. 14/09/2023			
mer. 13/09/2023			

Onglet « Profil d'évolution du traitement »


Le profil d'évolution du traitement permet de visualiser la tendance du traitement du patient grâce aux graphiques sur les éléments suivants :

- Durée d'utilisation
- Fuite non intentionnelle
- Index d'évènements détectés
- Pression



Onglet « Objets connectés »

Dans le cas où le patient possède un objet connecté fourni par SEFAM et que l'Identifiant SEFAM Access du patient est renseigné dans les coordonnées du patient, les mesures apparaissent avec des graphiques sur cette page si le patient prend des mesures avec cet appareil sur l'application SEFAM Access Lite sur son smartphone.

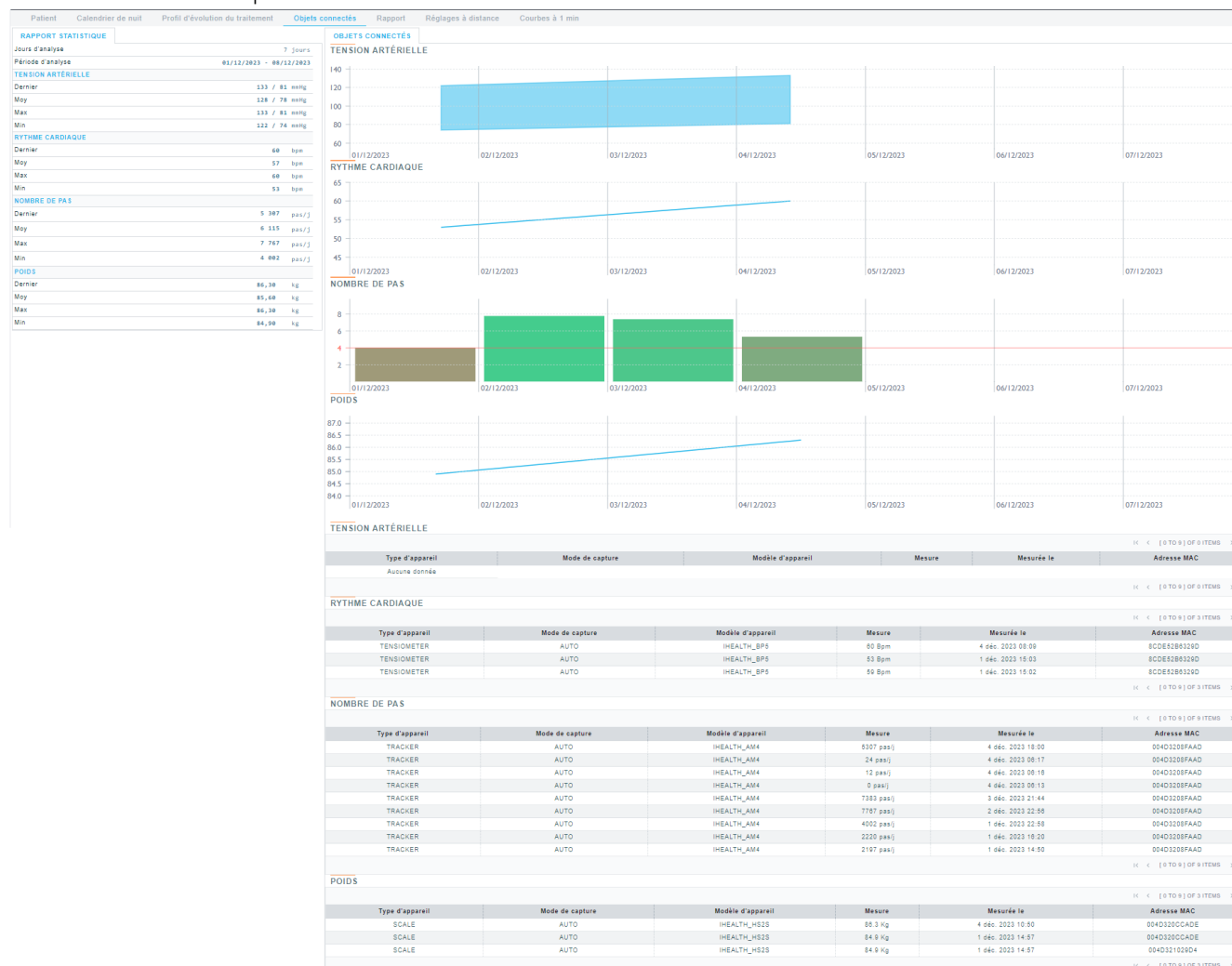

Il est nécessaire de renseigner « l'identifiant SEFAM Access » dans les coordonnées du patient pour afficher les données des objets-connectés récupérées avec l'application SEFAM Access Lite.

Nom	Demo
Prénom	Patient
Nom de jeune fille	-
Genre	Homme
Date de naissance	01/04/2023

Adresse mail	-
Organisation	Sefam UK
Téléphone	-
Téléphone Mobile	-
Identifiant SEFAM Access	anonym-alexandre4057555@sefam-medical.com

Onglet « Rapport »

Depuis cet onglet, vous pouvez générer le rapport de l'observance en format PDF du patient. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur « GÉNÉRER LE RAPPORT » après avoir vérifié la configuration de votre rapport (période, sections à inclure, les paramètres d'analyse). Le rapport se génère en tant qu'aperçu, pouvez ensuite le télécharger ou l'imprimer à l'aide des boutons affichés sur l'aperçu.

Notes : les graphiques par niveau de pression ne sont disponibles que pour une période qui ne dépasse pas 15 jours.

← Patient Demo ? 3M 28J 15J | 24/01/2024 - 07/02/2024

Patient Calendrier de nuit Profil d'évolution du traitement Objets connectés **Rapport** Réglages à distance Courbes à 1 min

Période sélectionnée
24/01/2024 - 07/02/2024

Sections incluses

- ☐ Rapport statistiques
- ☒ Profil d'évolution du traitement
- ☒ Calendrier de nuit
- ☐ Graphiques par niveau de pression


Exclure des événements

- ☒ Exclure les apnées centrales
- ☒ Exclure les hypopnées centrales

Exclure des durées

- ☒ Exclure le temps pendant la rampe
- ☒ Exclure le temps au delà de la limite de fuite

GÉNÉRER LE RAPPORT

 Créer votre rapport patient en PDF
Depuis le panneau de configuration sur votre gauche

Période sélectionnée
01/01/2024 - 15/01/2024

← janvier 2024 février 2024 →

lu	ma	me	je	ve	sa	di	lu	ma	me	je	ve	sa	di
01	02	03	04	05	06	07				01	02	03	04
08	09	10	11	12	13	14	05	06	07	08	09	10	11
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25
29	30	31					26	27	28	29			

Exclure des durées

- ☒ Exclure le temps pendant la rampe
- ☒ Exclure le temps au delà de la limite de fuite

GÉNÉRER LE RAPPORT

← Patient Demo ? 3M 28J 15J | 24/01/2024 - 07/02/2024

Patient Calendrier de nuit Profil d'évolution du traitement Objets connectés **Rapport** Réglages à distance Courbes à 1 min

Période sélectionnée
01/01/2024 - 15/01/2024

Sections incluses

- ☐ Rapport statistiques
- ☒ Profil d'évolution du traitement
- ☒ Calendrier de nuit
- ☒ Graphiques par niveau de pression

Exclure des événements

- ☐ Exclure les apnées centrales
- ☐ Exclure les hypopnées centrales

Exclure des durées

- ☒ Exclure le temps pendant la rampe
- ☒ Exclure le temps au delà de la limite de fuite

GÉNÉRER LE RAPPORT

Patient_Demo-2024-01-01-2024-01-15 1 / 4 100% +

Demo - Patient (01/04/2023) 5.8x 120R21083954

Rapport statistique

Période d'analyse: 15 jours (1 janvier 2024, 15 janvier 2024)

Derniers réglages de la période

Mode: APAP Pression rampe: 4.0 cmH2O
Pressions réglées: [7.0 - 18.0] cmH2O Circuit patient: 15 mm
Comfort Control Plus: Niveau 2 (sur la séance) Fuite théorique au masque: Type C : 42 l/min
Rampe: 1.RAMP
Durée de rampe: Durée max. de rampe : 45m

Principaux éléments

I&E total (Excluant le temps en rampe): 1.2 evts/h
Seuils de fuite (en cmH2O): 2h 15m
Durée d'utilisation (h) / Période: 13.0 cmH2O
F.90%: 0 l/min
Fuite non intentionnelle: 0 l/min

Informations sur l'observance

Durée d'utilisation (h) / Période: 2h 15m Durée moy. passée en rampe (h): 12m 52s
Durée d'utilisation (h) / Jours d'utilisation: 6h 44m Jours d'utilisation < 4 h: 0 jours (0.0%)
Durée d'utilisation < fuite lim. (h) / Période: 2h 13m Masque débranché: 0
Jours d'utilisation >= 4 h: 5 jours (33.3%) Durée max d'utilisation (h): 7h 41m
Jours sans utilisation: 10 jours (66.7%)
Nombre total de séances ON/OFF: 5 (0 jour)

P1 : Rapport statistique

Donné Patient : 16104(0202) **Box :** 1200R2100304

Support statistique

Prévision

Principaux éléments

Informations sur l'observance

Prévision

P2 : Profil d'évolution du traitement

Donné Patient : 16104(0202) **Box :** 1200R2100304

Données par niveau de pression

Prévision

Exercices par niveau de pression

P3 : Calendrier de nuit

Donné Patient : 16104(0202) **Box :** 1200R2100304

Profil d'exécution du traitement

Prévision

P4 : Graphiques par niveau de pression

Donné Patient : 16104(0202) **Box :** 1200R2100304

Prévision

Onglet « Réglages à distance »

Cette interface permet surtout de programmer une demande de réglages à distance. L'envoi d'une nouvelle demande de réglages à distance est possible lorsqu'il y a déjà eu au moins une séance transmise.

En bas de la page, vous pouvez afficher l'historique des demandes d'envoi de réglages à distance avec l'indication du statut des demandes. Cette liste permet de lister les changements de réglages des machines qui sont envoyés à distance.

Patient Demo
3M 29J 15J 26/09/2023 - 01/10/2023

Patient Calendrier de nuit Profil d'évolution du traitement Objets connectés Rapport Réglages à distance Courbes à 1 min

DEMANDE D'ENVOI DE RÉGLAGES À DISTANCE

Numéro de série machine : 1200R21063954
Type de machine : S.Box

ENVOYER LES RÉGLAGES

PRESSIONS RÉGLÉES

Mode

☒ APAP ☐ CPAP

Pression*

Min (cmH2O) 7 Max (cmH2O)* 18

RAMPE

Type de rampe

☐ T.RAMP ☒ I.RAMP ☐ Pas de rampe

Pression rampe*

Pression (cmH2O)* 4

CIRCUIT PATIENT

Type de circuit patient

15 mm

FUITE THÉORIQUE AU MASQUE

Type masque

Type C

Fuite théorique au masque

42

COMFORT CONTROL PLUS

Comfort Control Plus (patient)

Niveau CC+

Toute la séance - Niveau 2

ACCESSOIRES

Humidificateur

Tuyau chauffant

RÉGLAGE PATIENT

Limitier l'accès patient

HISTORIQUE DES DEMANDES D'ENVOI DE RÉGLAGES À DISTANCE

Date demande	Demandeur	Mode / Pressions	Rampe / Réglages patient	CP / CC+	Statut	
11 déc. 2023 12:44	Doctor 1	Mode Pression min. Pression max. Type masque Fuite théorique au masque	APAP 4 cmH2O 18 cmH2O C Durée max. de rampe 42 l/min Régler patient	Rampe activée Type de rampe Pression rampe Durée max. de rampe Régler patient	Oui IRAMP 10 cmH2O 45 min Non Circuit patient CC+ Activé (patient) Comfort Control Plus 15 mm Oui Toute la séance - Niveau 2	Demande effectuée le 12 déc. 2023 04:34 La machine n'a pas pu appliquer les réglages
12 nov. 2023 13:34	Doctor 1	Mode Pression min. Pression max. Type masque Fuite théorique au masque	APAP 4 cmH2O 16 cmH2O C Durée max. de rampe 42 l/min Régler patient	Rampe activée Type de rampe Pression rampe Durée max. de rampe Régler patient	Oui IRAMP 7 cmH2O 45 min Non Circuit patient CC+ Activé (patient) Comfort Control Plus 15 mm Oui Toute la séance - Niveau 2	Demande effectuée le 18 nov. 2023 22:51 La machine n'a pas pu appliquer les réglages
21 sept. 2023 10:09	Dumont Paul	Mode Pression min. Pression max. Type masque Fuite théorique au masque	APAP 4 cmH2O 14 cmH2O C Durée max. de rampe 42 l/min Régler patient	Rampe activée Type de rampe Pression rampe Durée max. de rampe Régler patient	Oui IRAMP 6.5 cmH2O 45 min Non Circuit patient CC+ Activé (patient) Comfort Control Plus 15 mm Oui Toute la séance - Niveau 2	Demande effectuée le 21 sept. 2023 22:08 Appliqué le 21 sept. 2023 22:08
20 sept. 2023 18:30	Dumont Paul	Mode Pression min. Pression max. Type masque Fuite théorique au masque	APAP 4 cmH2O 14 cmH2O C Durée max. de rampe 42 l/min Régler patient	Rampe activée Type de rampe Pression rampe Durée max. de rampe Régler patient	Oui IRAMP 7.5 cmH2O 45 min Non Circuit patient CC+ Activé (patient) Comfort Control Plus 15 mm Oui Toute la séance - Niveau 2	Demande effectuée le 21 sept. 2023 07:32 Appliqué le 21 sept. 2023 07:32
8 mai 2023 18:35	Dumont Paul	Mode Pression min. Pression max. Type masque Fuite théorique au masque	APAP 4 cmH2O 17 cmH2O C Durée max. de rampe 42 l/min Régler patient	Rampe activée Type de rampe Pression rampe Durée max. de rampe Régler patient	Oui IRAMP 4 cmH2O 45 min Non Circuit patient CC+ Activé (patient) Comfort Control Plus 15 mm Oui Toute la séance - Niveau 2	Demande effectuée le 9 mai 2023 07:51 Appliqué le 9 mai 2023 07:52

Envoi de nouveaux réglages

×

Veuillez valider l'envoi de nouveaux réglages.

ATTENTION, CES RÉGLAGES SERONT VALIDÉ 7 JOURS. UNE FOIS CE DÉLAI DÉPASSÉ SI LA MACHINE N'A PAS ÉMISE, LES RÉGLAGES NE SERONT PAS SAUVEGARDÉS DANS LA MACHINE.

ANNULER

VALIDER

Message de vérification s'affiche en appuyant sur le bouton « ENVOYER LES RÉGLAGES ». La validité des demandes est toujours à 7 jours.

Une fois que les nouveaux réglages sont envoyés, l'interface indique qu'il y a déjà une nouvelle demande de réglages à distance en cours pour cette machine et l'historique affiche les nouveaux réglages avec le statut « En attente de transmission ». Un clic sur « SUPPRIMER L'ENVOI EN COURS » permet de supprimer la dernière demande des réglages à distance en attente de transmission.

DEMANDE D'ENVOI DE RÉGLAGES À DISTANCE

Numéro de série machine : 1200R21063954
Type de machine : S Box

SUPPRIMER L'ENVOI EN COURS

IL Y A DÉJÀ UNE DEMANDE DE RÉGLAGE
DEMANDE EFFECTUÉE LE 7 FÉVR. 2024 12:04
ÉTAT DE LA DEMANDE : EN ATTENTE DE TRANSMISSION

HISTORIQUE DES DEMANDES D'ENVOI DE RÉGLAGES À DISTANCE						
ELEMENTS PAR PAGE : 10 < < [1 À 5] SUR 7 RÉSULTAT(S) > >						
Date demande	Demandeur	Mode / Pressions	Rampe / Réglages patient	CP / CC+	Statut	
7 févr. 2024 12:04	Nom Prénom	Mode Pression Type masque Fuite théorique au masque	CPAP 8 cmH ₂ O C 42 l/min Rampe activée Type de rampe Réglage patient	Non OFF Non Circuit patient CC+ Activé (patient) Comfort Control Plus	15 mm Oui Toute la séance - Niveau 2	En attente de transmission
11 déc. 2023 12:44	Doctor 1	Mode Type masque Fuite théorique au masque	APAP C 42 l/min Rampe activée Type de rampe Réglage patient	Oui IRAMP Non Circuit patient CC+ Activé (patient) Comfort Control Plus	15 mm Oui Toute la séance - Niveau 2	Demande effectuée le 12 déc. 2023 04:34 La machine n'a pas pu appliquer les réglages

Onglet « Courbe à 1 min »

Visualiser les courbes détaillées à la minute relatives à l'efficacité de traitement tel que l'état des voies aérienne supérieure, les différents événements détectés, la pression délivrée, la fuite non-intentionnelle et la fuite limite.



Liste des machines



Machines

Cet onglet permet de visualiser l'ensemble des machines affiliées à votre organisation. Cette rubrique permet également de savoir à quel patient sont appairées ces machines. On y retrouve également la possibilité d'aller directement sur le dossier du patient concerné en cliquant sur le nom du patient.

Liste des machines:

ELEMENTS PAR PAGE : 20 [1 À 9] SUR 9 RÉSULTAT(S)									
Numéro de série machine	Type de machine	Date de livraison	Version	Organisation	Première transmission	Dernière transmission	Nom Patient	Date de naissance	Actions
1200R21053550	S.Box	-	A020100	Sefam UK	2021-02-18 13:22:11	2023-03-11 12:17:34	-	-	
1200R21063964	S.Box	-	-	Sefam UK			-	-	
1200R21063954	S.Box	-	A020100	Sefam UK	2021-04-08 11:35:45	2024-01-28 23:53:45	(99723) Demo Patient	2023-04-01	
1200R20399611	S.Box	-	A020100	Sefam UK	2021-05-10 14:47:45	2023-05-13 14:09:39	-	-	
1200R20255695	S.Box	-	A020100	Sefam UK	2021-07-15 14:47:56	2023-12-19 03:19:18	(56394) Demo Patrick	1973-02-01	
1200R17450107	S.Box	-	A020100	Sefam UK	2022-02-15 10:40:33	2023-06-19 11:23:02	-	-	
1200R22203742	S.Box	-	A020200	Sefam UK	2022-10-26 12:02:14	2024-01-29 08:18:31	-	-	
1260R22200206	S.Box Duo ST	-	T010300	Sefam UK	2022-06-30 16:38:42	2024-01-26 15:29:55	(56289) Demo Demo	1965-01-23	
1200R21237562	S.Box	-	A020100	Sefam UK	2022-12-07 15:50:00	2023-11-14 13:10:13	(91556) Demo Honoré	1978-12-06	
ELEMENTS PAR PAGE : 20 [1 À 9] SUR 9 RÉSULTAT(S)									

Les colonnes disponibles :

Recherche Configurer la liste

Colonnes à afficher

- ☐ ID
- ☒ Numéro de série machine
- ☒ Type de machine
- ☒ Organisation de livraison
- ☒ Date de livraison
- ☒ Version
- ☒ Organisation
- ☒ Première transmission
- ☒ Dernière transmission
- ☒ Nom Patient
- ☒ Date de naissance
- ☒ N° Patient
- ☒ Date d'installation
- ☒ Actions

TOUT AFFICHER

- ID
- Numéro de série de la machine
- Type de machine
- Organisation de livraison
- Date de livraison à l'organisation actuelle
- Version de la machine
- Organisation dans laquelle se trouve la machine
- Date de la première transmission
- Date de la dernière transmission
- Nom du patient à qui cette machine est affectée
- Date de naissance du patient
- Numéro du patient
- Date d'installation de la machine au patient
- Actions (déplacement de la machine, liste des transmission)

Les filtres de recherche :

Recherche Configurer la liste

Dernière transmission
Date

Première transmission
Date

Date d'installation
Date

Numéro de série machine

Nom du patient

Machines attribuées
Toutes

Nom du modèle

- ☐ MO+
- ☐ DreamStar Auto
- ☐ DreamStar Info
- ☐ DreamStar Duo
- ☐ DreamStar Duo ST
- ☐ EcoStar Auto
- ☐ EcoStar Info
- ☐ S.Box Auto
- ☐ S.Box Info
- ☐ S.Box Duo
- ☐ S.Box Duo ST

Machines non communicantes

- ☐ Non communicantes

RÉINITIALISER LES FILTRES

- Date de la dernière transmission
- Date de la première transmission
- Date d'installation
- S/N de la machine
- Nom du patient
- Le statut de la machine
- Modèle de la machine
- Machines non-communicantes
(=machines qui n'émettent plus depuis 3 ans)

Machines attribuées

Toutes

Associées

Anonymes

Actions :

- Déplacement de machine
- Liste des transmissions

Déplacement des machines :

Il est possible de déplacer la machine dans une sous-organisation à la date voulue. Saisissez la date de déplacement souhaitée et le nom de l'organisation de cible. (Attention : les données transmises de la machine avant la date de déplacement saisie ne seront pas consultables dans l'organisation de cible.)

de naissance	N° Patient	Date d'installation	Actions
			<div>Déplacer la machine dans une autre organisation</div>

Déplacer la machine dans une autre organisation

Numéro de série machine*

1200R19205491


Date de déplacement

31/01/2024

Nom de l'organisation*

CHANGER D'ORGANISATION

Liste des transmissions

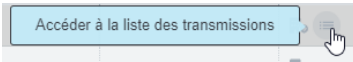

- Date de transmission
- Type de média utilisé pour transmettre les données : MODEM (modem GSM/ModCom)/ Module Wi-Fi / Windows (Up to Cloud)
- Identifiant (S/N du modem, ...)
- Version média
- Nombre de séances transmises

Machine: ⌵ ⌴

LISTE DES TRANSMISSIONS

Numéro de série machine : 1200R19205491
Type de machine : S.Box

[1 À 20] SUR 580 RÉSULTAT(S)				
Date de transmission ▲	Type média	Identifiant	Version média	Nb séances
30/01/2024 15:21	WIFI	A81B6A9F6245	WIFI_V_01_05_00	4
30/01/2024 11:57	WIFI	A81B6A9F6245	WIFI_V_01_05_00	4
22/12/2023 15:19	MODEM	CHU2258046340	3G_V_03_00_08	7
22/12/2023 15:19	MODEM	CHU2258046340	3G_V_03_00_08	0
22/12/2023 15:18	MODEM	CHU2258046340	3G_V_03_00_08	0
22/12/2023 15:17	MODEM	CHU2258046340	3G_V_03_00_08	0
22/12/2023 15:16	MODEM	CHU2258046340	3G_V_03_00_08	0
22/12/2023 15:16	MODEM	CHU2258046340	3G_V_03_00_08	0
15/12/2023 14:55	WIFI	A81B6A9F6245	WIFI_V_01_05_00	0
15/12/2023 14:27	MODEM	CHU2258046340	3G_V_03_00_08	1
15/12/2023 14:23	MODEM	CHU2258046340	3G_V_03_00_08	3
15/12/2023 14:22	MODEM	CHU2258046340	3G_V_03_00_08	0
15/12/2023 14:22	MODEM	CHU2258046340	3G_V_03_00_08	0
15/12/2023 14:21	MODEM	CHU2258046340	3G_V_03_00_08	0
15/12/2023 14:20	MODEM	CHU2258046340	3G_V_03_00_08	0
15/12/2023 14:19	MODEM	CHU2258046340	3G_V_03_00_08	0
14/12/2023 09:58	WIFI	F45EAB9EBB60	WIFI_V_01_04_00	2
13/12/2023 17:39	MODEM	1261D22240003	MCP_V_02_01_99	1
13/12/2023 17:34	MODEM	1261D22240003	MCP_V_02_01_99	1
13/12/2023 17:32	MODEM	1261D22240003	MCP_V_02_01_99	1
[1 À 20] SUR 580 RÉSULTAT(S)				


Historique des réglages



Historique des réglages

L'historique des demandes d'envoi de réglages à distance permet de visualiser toutes les demandes de réglages à distance programmés dans l'organisation.

Historique des demandes d'envoi de réglages à distance:					
ELEMENTS PAR PAGE : 20 [1 À 19] SUR 19 RÉSULTAT(S)					
Date demande	Demandeur	Machine	Patient	Info	Statut
2024-02-07 12:04:10	Nom Prénom	1200R21063954 S.Box	Demo Patient	?	En attente de transmission
2023-12-11 12:44:00	Doctor 1	1200R21063954 S.Box	Demo Patient	?	Demande effectuée le 12 déc. 2023 04:34 La machine n'a pas pu appliquer les réglages
2023-11-12 13:34:12	Doctor 1	1200R21063954 S.Box	Demo Patient	?	Demande effectuée le 18 nov. 2023 22:51 La machine n'a pas pu appliquer les réglages
2023-10-05 07:46:44	Lucas Aimé	1260R22200206 S.Box Duo ST	Demo Demo	?	Demande effectuée le 6 oct. 2023 03:41 Appliqué le 6 oct. 2023 03:41
2023-09-21 13:40:00	Dumont Paul	1260R22200206 S.Box Duo ST	Demo Demo	?	Réglages jamais envoyés La machine n'a pas été connectée avant le 23 sept. 2023 13:40
2023-09-21 10:09:35	Dumont Paul	1200R21063954 S.Box	Demo Patient	?	Demande effectuée le 21 sept. 2023 22:08 Appliqué le 21 sept. 2023 22:08
2023-09-20 18:30:53	Dumont Paul	1200R21063954 S.Box	Demo Patient	?	Demande effectuée le 21 sept. 2023 07:32 Appliqué le 21 sept. 2023 07:32
2023-08-17 15:44:35	Doctor 2	1200R20255695 S.Box	Demo Patrick	?	Demande effectuée le 18 août 2023 06:22 Appliqué le 18 août 2023 06:22

L'onglet info  permet d'afficher le détail de la demande envoyée.

1260R22200206 S.Box Duo ST	Demo Demo		Demande effectuée le 6 oct. 2023 03:41 Appliqué le 6 oct. 2023 03:41
Pression de confort	Demo Demo		Réglages jamais envoyés La machine n'a pas été connectée, ava
Durée max. de rampe			0
EPAP [EXP]	Demo Patient		Demande effectuée le 21 sept. 2023 21:00 Appliqué le 21 sept. 2023 21:00
IPAP [INSP]			6 cmH2O
Fréquence de sauvegarde			Demande effectuée le 21 sept. 2023 07:30 Appliqué le 21 sept. 2023 07:30
Ratio IPAP/EPAP			130
Sensibilité inspiratoire [IT]			Demande effectuée le 18 août 2023 06:22 Appliqué le 18 août 2023 06:22
Sensibilité expiratoire [ET]			7
Temps de montée en pression			Demande effectuée le 17 août 2023 05:15 Appliqué le 17 août 2023 05:15
Type masque	Demo Patient		Demande effectuée le 9 mai 2023 07:50 Appliqué le 9 mai 2023 07:50
Fuite théorique au masque			42 l/min
Mode	Demo Patient		Demande effectuée le 27 avr. 2023 23:16 Appliqué le 27 avr. 2023 23:16
Réglage patient			Non
Circuit patient	Demo Patrick		Demande effectuée le 10 déc. 2022 06:41 Appliqué le 10 déc. 2022 06:41
Humidificateur			Non présent

La colonne statut quant à elle permet de visualiser l'état de la demande de réglage envoyée. Ainsi l'utilisateur sait lorsque sa demande de réglage à bien été pris en compte et appliquée.

ATTENTION : Les demandes de réglages à distance seront appliquées lors de la prochaine utilisation de l'appareil, après la transmission de la nouvelle séance.

Colonnes disponibles :

Recherche

Configurer la liste

Colonnes à afficher

☐ ID de la machine

☒ Date de demande

☒ Demandeur

☒ Machine

☒ Patient

☒ Informations

☒ Status

TOUT AFFICHER

- ID de la machine
- Date de demande
- Nom du demandeur
- Machine concernée
- Nom du patient
- Informations des réglages
- Statut

Recherche des demandes de réglages à distance par statut :

Recherche

Configurer la liste

Statut

☐ Réglages en attente d'envoi

☐ Réglages envoyés

☐ Réglages appliqués

☐ Réglages non appliqués

☐ Réglages jamais envoyés

☐ Réglages expiré

RÉINITIALISER LES FILTRES

- En attente d'envoi
- Envoyé
- Appliqué
- Non appliqué
- Jamais envoyé
- Expiré

Liste des utilisateurs



L'administrateur a également pour rôle de créer les utilisateurs qui pourront se connecter à l'interface SEFAMconnect. Ces utilisateurs seront répartis dans les différents groupes créés précédemment ce qui déterminera les droits qui leurs sont accordés pour l'utilisation de l'interface. Ils seront également rattachés à une organisation ou sous organisation.

Users: + ⌵

ELEMENTS PER PAGE : 10 < > [1 TO 10] OF 44 RESULT(S)

Lastname ▼	Firstname	Organization	User group	Login	Phone	Last login	Status	Actions
DEMO	Marine	AIRSEFAM	SFC Lead User	anonym-lucy84631189@sefam-medical.com		2024-02-06 08:15:36	Enabled	
DEMO	Jacques	Sefam UK	Physiologist	anonym-bgiraud29707496@sefam-medical.com		2023-12-19 11:42:25	Enabled	
DEMO	Jean-Damien	AIRSEFAM	SFC Lead User	anonym-christophe1957982@sefam-medical.com		2024-02-05 13:11:06	Enabled	
DEMO	Charles	AIRSEFAM	SFC Lead User	anonym-antoine.fischer7416514@sefam-medical.com		2024-02-07 10:13:54	Enabled	
DEMO	Charles	Test vbastien	SFC Lead User	anonym-claurent48972321@sefam-medical.com			Pending	
DEMO	Quentin	AIRSEFAM	SFC Lead User	anonym-frederic.gaillard0470463@sefam-medical.com			Pending	
DEMO	Isabelle	Sefam UK	Temporary staff	anonym-hebert.colette3945523@sefam-medical.com		2023-09-22 14:03:09	Enabled	
DEMO	Louise	Sefam UK	SFC Lead User	anonym-cbailly93970491@sefam-medical.com		2024-01-25 15:57:01	Disabled	
DEMO	Frederic	Sefam UK	Nurse	anonym-maggie.letellier5685854@sefam-medical.com		2024-01-24 19:33:02	Enabled	
DEMO	Vincent	AIRSEFAM	SFC Lead User	anonym-charles69390874@sefam-medical.com		2023-12-13 14:52:51	Enabled	

ELEMENTS PER PAGE : 10 < > [1 TO 10] OF 44 RESULT(S)

Recherche

Configurer la liste

Colonnes à afficher

☐ ID
☒ Nom
☒ Prénom
☒ Organisation
☒ Groupe d'utilisateurs
☐ Type d'utilisateur
☒ Identifiant
☒ Téléphone
☒ Dernière connexion
☒ Statut
☐ Actions

TOUT AFFICHER

Les colonnes disponibles :

- ID
- Nom de l'utilisateur
- Prénom de l'utilisateur
- Organisation à laquelle appartient l'utilisateur
- Groupe d'utilisateurs dont fait partie l'utilisateur
- Type d'utilisateur
- Identifiant
- Numéro de téléphone portable
- Date de dernière connexion
- Statut de l'utilisateur (actif, désactivé, en attente, verrouillé)

NOTES : Le cadenas rouge indique que le compte est bloqué soit à la suite de 3 erreurs de saisie de mot de passe lors de la connexion soit par l'administrateur qui peut donner ou retirer l'accès à un utilisateur en cliquant sur le cadenas.

Il est possible de débloquer le compte bloqué par un clic sur le cadenas rouge : le mail sera envoyé à l'utilisateur pour réinitialiser le mot de passe. Après la réinitialisation du mot de passe, le cadenas devient vert.



Un clic sur permet d'ajouter un nouvel utilisateur.

×

AJOUTER UN UTILISATEUR

INFORMATIONS DE CONNEXION

Identifiant*

john.doe@email.com

Type d'utilisateur*

Prestataire de santé à domicile

Organisation*

INFORMATIONS UTILISATEUR

Prénom*

Nom*

Numéro de téléphone

Fuseau horaire*

Europe/Paris

Code pays*

France

VALIDER

Les champs avec une * sont obligatoires :

- Identifiant (adresse email)
- Type d'utilisateur
- Organisation
- Prénom
- Nom
- Fuseau horaire
- Pays

La liste 'Organisation' fait apparaitre les organisations / sous organisations créés précédemment, sélectionner l'organisation / sous organisation à laquelle l'utilisateur appartient.

Choisir un identifiant avec lequel l'utilisateur se connectera, un mail lui sera envoyé à l'adresse mail renseignée pour valider son compte en définissant son mot de passe.

Les critères de recherche :

- Prénom
- Nom
- ID
- Organisation
- ID
- Groupe d'utilisateurs
- Statut de l'utilisateur : actif, désactivé (bloqué par un autre utilisateur), en attente (en attente de la validation du compte), verrouillé (bloqué à cause de trop de tentatives)

Recherche

Configurer la liste

Prénom

Nom

ID

Organisation

Identifiant

Groupe d'utilisateurs

Tout

Statuts de l'utilisateur

☐ Actif

☐ Désactivé

☐ En attente

☐ Verrouillé

RÉINITIALISER LES FILTRES

Liste des docteurs



Liste des docteurs qui sont associés à l'organisation (ceux qui ont été créés dans l'organisation ou liés à cette dernière).

- ID (pour les organisations dont le code pays est la France, c'est le numéro RPPS si le lien est fait)
- Nom
- Prénom

Doctors | Active filters: ⌵ ⌴

ELEMENTS PER PAGE : 20 ⌵ |< < [1 TO 2] OF 2 RESULT(S) > >|

ID	LastName ⌵	Firstname
user-13104	Doctor	2
user-12360	Doctor	1

ELEMENTS PER PAGE : 20 ⌵ |< < [1 TO 2] OF 2 RESULT(S) > >|

Recherche [Configurer la liste](#)

Colonnes à afficher

☒ ID

☒ Prénom

☒ Nom

TOUT CACHER

[Recherche](#) Configurer la liste

Nom

ID

RÉINITIALISER LES FILTRES

Paramètres d'analyses



Paramètres d'analyses

Les paramètres d'analyses permettent d'ajuster les paramètres qui serviront aux calculs des différents indicateurs et graphiques présents sur l'interface, à savoir le tableau de bord, la liste des patients (d'observance) et le rapport PDF, permettant de suivre le bon déroulement du traitement du patient.

- Période :
 - Période de base (**1 mois**/28 jours/30 jours)
 - Période de suivi initial (**3 fois la période de base**/4 fois la période de base)
- Observance :
 - Seuil bas d'utilisation moyenne (2 minutes, 3 minutes, **4 minutes**, 5 minutes)
 - Seuil haut d'utilisation moyenne (3 minutes, 4 minutes, **5 minutes**, 6 minutes)
 - Pourcentage de jour supérieur au seuil bas (pas de critère, 50%, 55%, 60%, 65%, **70%**, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%, 100%)
- Efficacité du traitement :
 - Seuil bas d'IAH (\leq **3 evts/h**, 5 evts/h, 10 evts/h, 15 evts/h)
 - Seuil haut d'IAH (\leq **10 evts/h**, 15 evts/h, 20 evts/h, 25 evts/h)
 - Pourcentage de temps où la fuite est supérieur à la fuite limite (pas de critère, 5%, **10%**, 15%, 20%, 25%)
 - Fuite atteinte (pas de critère, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, **90%**, 95%, 100%)
 - Pression efficace (pas de critère, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, **90%**, 95%, 100%)
- Évènements respiratoires :
 - Hypopnées centrales (inclure/**exclude**)
 - Anées centrales (**inclure**/exclude)
- Évènements respiratoires :
 - Temps passé en rampe (inclure/**exclude**)
 - Temps au-dessus de la fuite limite (inclure/**exclude**)

En gras... valeurs par défaut

PÉRIODE

Période de base 1 mois

Période de suivi initial 3 fois la période de base

OBSERVANCE




Utilisation moyenne

 < 4 minutes  de 4 à 5 minutes  >= 5 minutes

Pourcentage de jour supérieur au seuil bas 70%

EFFICACITÉ DU TRAITEMENT

IAH

 <= 5 evts/h  de 5 à 10 evts/h  > 10 evts/h

Pourcentage de temps où la fuite est supérieure à la fuite limite 10%

Fuite atteinte (F90) 90 % du temps

Pression efficace (P90) 90 % du temps

ÉVÈNEMENTS RESPIRATOIRES

Inclure les hypopnées centrales ☐

Inclure les apnées centrales ☐

DURÉE D'ANALYSE

Incluant le temps passé en rampe ☐

Incluant le temps au-dessus de la fuite limite ☐

Modification de la période ☐

Durée période de base

1 mois

1 mois - Défaut

28 jours

30 jours

1 mois

MODIFIER

Durée période de suivi

3 fois la période de base

4 fois la période de base - Défaut

3 fois la période de base

4 fois la période de base

Modification de l'observance ☐

Seuil bas d'utilisation moyenne

< 4 minutes

< 4 minutes - Défaut

< 2 minutes

< 3 minutes

< 4 minutes

< 5 minutes

70%

MODIFIER

Modification de l'observance ☐

Seuil bas d'utilisation moyenne

< 4 minutes

Seuil haut d'utilisation moyenne

>= 5 minutes

>= 5 minutes - Défaut

>= 3 minutes

>= 4 minutes

>= 5 minutes

>= 6 minutes

Pourcentage de jour supérieur au seuil bas

70%

70% - Défaut

Pas de critère

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Modification de l'efficacité du traitement

Seuil bas d'index d'apnée/hypopnée

<= 5 evts/h

<= 3 evts/h - Défaut

<= 3 evts/h

<= 5 evts/h

<= 10 evts/h

<= 15 evts/h

10%

Fuite atteinte (F90)

90%

Pression efficace (P90)

90%

MODIFIER

Modification de l'efficacité du traitement

Seuil bas d'index d'apnée/hypopnée

<= 5 evts/h

Seuil haut d'index d'apnée/hypopnée

> 10 evts/h

> 10 evts/h - Défaut

> 10 evts/h

> 15 evts/h

> 20 evts/h

> 25 evts/h

90%

Pression efficace (P90)

90%

MODIFIER

Pourcentage de temps où la fuite est supérieure à la fuite limite

10%

10% - Défaut

Pas de critère

5%

10%

15%

20%

25%

Fuite atteinte (F90)

90%

90% - Défaut

Pas de critère

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Pression efficace (P90)

90%

90% - Défaut

Pas de critère

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Cybersécurité








Afin de garantir une utilisation en toute sécurité de Sefam Connect, nous vous recommandons de respecter les principes suivants :

- Adopter une politique de mot de passe rigoureuse : choix d'un mot de passe différent pour chaque accès, que personne ne peut deviner et le modifier régulièrement.
- Faire régulièrement les mises à jour de sécurité
- Se protéger des virus et des logiciels malveillant via l'utilisation d'un antivirus et d'un pare-feu bien configuré
- Eviter les réseaux Wi-Fi publics ou inconnus

En cas de problèmes

Problème	Cause possible	Solution proposée
Problème d'affichage	Bug ou Navigateur web non compatible	Relancer le navigateur Choisir l'un des navigateurs web compatible Contacter l'assistance technique
Sefam Connect ne fonctionne pas	Causes externes ou bug	Contacter l'assistance technique
Compte bloqué	Trop grand nombre d'essais de connexion	Contacter votre administrateur ou Contacter l'assistance technique
Compte banni	Utilisateur dont le compte a été désactivé	Contacter l'assistance technique
Impossibilité de télécharger le manuel d'utilisation	Editeur PDF non fonctionnel	Télécharger Adobe Contacter l'assistance technique
Dispositif ou patient n'apparaissant plus dans votre organisation	Erreur humaine lors de l'utilisation du logiciel	Contacter l'assistance technique

Définition des symboles

Symbole	Description	Symbole	Description
	Appareil conforme aux exigences de la directive européenne 93/42/CE relative aux dispositifs médicaux.		Dispositif médical
	Fabricant		Date à laquelle la version a été validée et diffusée.
	Identifiant Unique du dispositif		Reference du dispositif médical
	Consulter les instructions d'utilisation électroniques: www.sefam-medical.com		

Marquage CE

Date du marquage CE du logiciel SEFAM Connect : 2024

Hébergement et Sécurité des données

Les serveurs d'hébergement sur lesquels la société SEFAM traite et stocke les Données dépendent des lois en vigueur dans le pays où le service de télétransmission des Données de suivi du traitement est proposé. SEFAM s'engage, dans le cadre d'une obligation de moyens, à assurer la sécurité et l'intégrité des Données stockées sur le Serveur, afin de prévenir un accès non autorisé aux Données.

En raison de la nature complexe des technologies utilisées et de l'Utilisateur du réseau Internet, SEFAM ne garantit pas un accès ininterrompu et permanent au Serveur. En cas d'indisponibilité du Serveur, notamment pour cause de maintenance, l'Utilisateur pourra se trouver dans l'impossibilité temporaire de stocker des Données ou d'y accéder, sans que la responsabilité de SEFAM ou de l'Hébergeur puisse être engagée.

SEFAM assure la maintenance et l'administration des Applications ainsi que la maintenance du Serveur.

SEFAM n'est en aucun cas responsable des problèmes de connexion du Terminal au réseau Internet et de l'éventuelle impossibilité de transmettre des Données qui pourrait en résulter. Il incombe à l'Utilisateur de souscrire, à ses frais, un accès Internet mobile ou fixe auprès d'un opérateur de télécommunications. L'Utilisateur est responsable de la sécurité et de l'intégrité du Terminal. L'Utilisateur assume la responsabilité du vol, de l'altération ou de la perte des Données résultant de la perte, du vol ou d'un défaut d'intégrité, de sécurité ou de maintenance du Terminal. Les identifiants et mots de passe de l'Utilisateur sont et doivent rester confidentiels. En cas de perte, de vol ou d'usurpation, l'Utilisateur doit en informer SEFAM dans les meilleurs délais.

L'envoi et la réception de Données entre les Applications, les Dispositifs Médicaux Connectés et le serveur sont réalisés grâce à une connexion sécurisée (TLS - Transport Layer Security).

Pour toute information concernant l'hébergement et la durée de conservation et la sécurité des données ou la politique de confidentialité, l'Utilisateur peut contacter la SEFAM à l'adresse suivante :

SEFAM
10 Allée Pelletier Doisy,
54600 Villers-lès-Nancy
03 83 44 85 00;
privacy@sefam-medical.com

Glossaire

AHI (IAH)

Index d'Apnées et d'Hypopnées

Auto-CPAP (Auto-PPC)

Mode auto-piloté.

Circuit Select

Calibration spécifique du circuit pneumatique.

CNT AH (AH CNT)

Apnées et hypopnées classées comme centrales

CNT Apnoeas (apnées CNT), CNT Hypopnoeas (hypopnées CNT)

Apnées centrales, hypopnées centrales.

Comfort Control Plus

Si elle est activée par le praticien ou le Prestataire de Santé A Domicile, la fonction Comfort Control Plus (CC+) vise à augmenter la pression de traitement lors de l'inspiration et à la diminuer lors de l'expiration pour rendre la respiration plus confortable lors du traitement. Elle est activée soit en permanence, soit pendant la rampe, ou bien désactivée.

CPAP (PPC)

Mode Pression Positive Continue.

Humidifier (humidificateur)

Accessoire optionnel de l'appareil de Pression Positive comprenant un élément chauffant et un réservoir d'eau.

Heated tube (tuyau chauffant)

Tuyau chauffant de diamètre 15 mm.

IFL (LID)

Limitation Inspiratoire de Débit.

Index (index)

Nombre d'évènements par heure.

Intelligent Start

Cette fonction permet au patient de démarrer le traitement de façon automatique lors de ses premières respirations dans le masque, sans presser le bouton de mise en service / veille.

Mask disconnected (masque débranché)

Temps pendant lequel le masque du patient a été débranché.

Max. pressure (pression max.)

Niveau de pression maximum délivré par l'appareil en mode Auto-PPC.

Max. ramp time (temps de rampe max.)

Il permet au Prestataire de Santé A Domicile de limiter la valeur maximum du temps de rampe réglable en cas d'utilisation de la fonction rampe.

Min. pressure (pression min.)

Niveau de pression minimum délivré par l'appareil en mode Auto-PPC.

OBS AH (AH OBS)

apnées et hypopnées classées comme obstructives.

OBS Apnoeas (apnées OBS), OBS Hypopnoeas (hypopnées OBS)

Apnées obstructives, hypopnées obstructives.

Patient circuit (circuit patient)

Circuit patient utilisé : diamètre 15 mm, 22mm et Circuit Select (autre configuration).

% days of usage >= 4 h/d (% de jours d'utilisation >= 4 h/j)

Pourcentage de jours pour lesquels le patient a respiré avec la machine pendant un nombre d'heures supérieur à un seuil paramétrable.

Prescribed pressure (pression prescrite)

Niveau de pression prescrit pour le patient en mode PPC.

P.x % : pressure efficient more than x% of time (pression efficace plus de x % du temps)

Niveau de pression auquel le patient a passé plus d'un certain pourcentage de temps (x = seuil paramétrable).

Ramp function (fonction rampe)

La fonction rampe permet de rendre progressive la montée en pression pour aider le patient à s'endormir. Il existe deux types de rampe : T RAMP (rampe en temps) et I RAMP (rampe intelligente).

Ramp pressure

Niveau de pression produit par l'appareil au départ de la fonction rampe pour permettre au patient de s'endormir confortablement.

En mode Auto-PPC, la pression est ramenée à cette pression ou à la pression minimum (si pression confort < pression minimum) lors d'une absence de détection de cycle respiratoire supérieure à 2 minutes ou lors d'une détection de pression haute.

Ramp time (temps de rampe)

C'est le temps mis par l'appareil pour atteindre la pression prescrite à partir de la pression de confort en mode PPC ou pour activer la fonction Auto-PPC lorsque la rampe en temps est active.

Ramp type (type rampe)

Type de rampe sélectionnée, soit T Ramp (rampe en temps), soit I Ramp (rampe intelligente).

T.Ramp : le temps de rampe est déterminé par le médecin ou le Prestataire de Soin A Domicile.

I.Ramp : le temps de rampe est déterminé automatiquement par l'appareil.

SAAS : Software As A Service –

Logiciel en tant que service : Application logicielle disponible et accessible sur internet

Session (séance)

Période pendant laquelle les données sont enregistrées dans la mémoire entre la mise en service et la mise en veille de l'appareil.

Time in ramp (durée passée en rampe)

Durée passée en rampe.

Total usage time (durée d'utilisation totale)

Totalité du temps où le patient a respiré avec la machine.

Usage duration (durée d'utilisation)

Durée quotidienne moyenne pendant laquelle le patient a respiré avec la machine (Mise en service / Veille).



Fabricant :

SEFAM
144 AV CHARLES DE GAULLE
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FRANCE

Site de fabrication :

SEFAM
10 ALLEE PELLETIER DOISY
54600 VILLERS-LES-NANCY
FRANCE

REF

M-202DFU00-00-Version 2

2024-02